




# Masážní křeslo DF1688Y2

## Návod k použití



### Bezpečnostní upozornění

- Nenechávejte své dítě používat nebo hrát si s masážním křeslem. Přístroj není určen pro děti. 
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo je zcela nefunkční, okamžitě prosím přestaňte přístroj používat. Vypněte přívod elektřiny a kabel odpojte z elektrické zásuvky. Problém konzultujte se svým prodejcem.
- Pokud se během masáže začnete vlivem silné stimulace cítit nepohodlně nebo dokonce velmi špatně, nebo začne přístroj pracovat nesprávně, okamžitě křeslo odpojte z elektrické sítě a přestaňte jej používat.
- Masážní křeslo přestaňte používat, pokud je poškozen jeho povrch. V takovém případě kontaktujte svého prodejce.
- Pokud máte následující potíže, je třeba použití masážního křesla nejprve konzultovat se svým lékařem:
  - Jste v procesu léčby nebo se necítíte dobře
  - Máte problémy s páteří – abnormalita, křivost
  - Trpíte akutním onemocněním
  - Máte hyperplazii nebo vyčnívající meziobratlové disky
  - Jste těhotní nebo máte menstruaci
  - Máte horečku nebo jiné podobné potíže
- Nikdy nevkládejte ruce do funkčních částí masážního křesla.
- Předtím než začnete měnit úhel zádové nebo nožní opěrky, vždy se ujistěte, že před nebo za křeslem není postaven žádný přístroj nebo se tam nenachází žádná osoba. Ujistěte se také, že je okolo křesla dostatek prostoru. 

## Masážní křeslo DF1688Y2

- Křeslo nikdy nepoužívejte, pokud je odstraněno sedadlo nebo je mokré.
- Křeslo nepoužívejte v koupelně nebo v místech s vysokou vlhkostí. Stejně tak zabraňte namočení dálkového ovladače.
- Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením a nepoužívejte je v blízkosti zdrojů tepla jako jsou kamna a podobně.
- Nepoužívejte ředidla, těkavé oleje nebo bělicí prostředky, které by mohly způsobit změnu barvy nebo poškození potahu křesla.
- Tento přístroj není určen pro použití samotnými malými dětmi nebo osobami s malou postavou. Tyto osoby mohou masážní křeslo používat pouze pod odpovídajícím dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné používání křesla. Malé děti by měly hlídány, aby si s křeslem nehrály.



## Masážní křeslo DF1688Y2

### Funkce a vlastnosti

Uvnitř zádové části je umístěn jedinečný jezdící masážní mechanismus, který provádí masáž celých zad od krku až k pasu. Kromě masáže celých zad lze možné zvolit masáž pouze vybrané části nebo nastavit bodovou masáž požadovaného místa. Pomocí dálkového ovládání je možné volit mezi následujícími režimy masáže nebo nastavovat další parametry masážního systému.

#### 1. Hnětací a jehličková masáž

Jedinečný masážní mechanismus napodobuje práci odborného maséra, který provádí protahovací, tlakovou, hnětací nebo jehličkovou masáž. Všechny tyto druhy masáží dokáží pomoci účinné stimulace navrátit bolavým a ztuhlým zádovým svalům jejich pružnost a bezbolestnost. Díky masáži se zároveň také zlepšuje krevní oběh masírovaných částí, což poskytuje celkové uvolnění a relaxaci celého těla.

#### 2. Kmitavá masáž

Mechanismus kmitavé masáže poskytuje kromě základní uvolňující kmitavé masáže páteře, která pomáhá odstraňovat problémy s páteří a uvolňuje obratle a vazy, také zlepšuje pohyblivost páteře, stimuluje páteřní nervy, aktivuje buňky a podporuje krevní oběh.

#### 3. Tlaková masáž napodobující mačkání prsty

Uvnitř masážního mechanismu se nachází masážní kolečko, které napodobuje ruční prstovou masáž. Tato uvolňující mechanismus mačkání prsty je s odpovídající intenzitou opakovaně provázen na důležitých bodech celých zad. Tři nastavitelné šířky prstu pomáhají ještě efektivněji stimulovat zádové svaly, usnadňovat správný průtok krve a celkově zlepšovat imunitu lidského těla.

#### 4. Vibrační masáž

Masážní vibrační mechanismus umístěný v sedáku nabízí trvalé masážní vibrační vlny, které zajišťují efektivní formující stimulaci hýžděových a stehenních svalů. Zároveň také zlepšují krevní oběh a odstraňují únavu.

### 5. Masáž hýždí a stehen

Osm masážních hlavic umístěných v stehenní části sedáku poskytují jemnou ale účinnou masáž, která pomáhá rychle odstraňovat bolest stehen.

### 6. Masáž lýtek

Hnětací masáž: Masážní mechanismus poskytuje hnětací masáž lýtek od vrchu dolů nebo zespodu nahoru. Tato masáž je vhodná pro uvolnění bolavých lýtek a odstranění pocitu těžkých nohou. Flexibilní hnětací masážní hlavice jsou rozmístěny po bocích lýtek. Správně distribuovaná síla hnětení poskytuje ještě větší míru komfortu.

### 7. Generátor zdraví prospěšných negativních iontů

Součástí masážního křesla je také generátor zdraví prospěšných negativních iontů. Tyto ionty vytvoří přirozené prostředí s čerstvým a svěžím vzduchem jaké znáte například z lesa, mořské pobřeží nebo blízkosti vodopádů. Negativní ionty zvyšují podíl kyslíku ve vzduchu, což pomáhá řešit různé problémy jako je například únava. Nedostatek kyslíku v uzavřených místnostech totiž může způsobovat špatnou funkci mozku nebo stárnutí kůže. Naopak negativní ionty vám rychle dodají potřebnou energii.

### 8. Funkce nastavení sklonu zádové a nožní opěrky

Pro nastavení úhlu opěrky je určen speciálně navržený pneumatický mechanismus. Pracovní sklon zádové nebo nožní opěrky může být nastaven přesně podle vašich požadavků. Je tak možné nastavit téměř libovolnou masážní pozici. Masáž si tedy můžete vychutnávat v leže nebo v sedě.

### 9. Elektronický časovač

Masážní křeslo je vybaveno elektronickým časovačem, který se automaticky spustí po zapnutí masáže a po uplynutí nastavené doby automaticky zastaví masáž a vypne masážní křeslo. Tato funkce může předejít plýtvání energií a také nadměrné stimulaci způsobené zapomenutým vypnutím.

### 10. Automatický masážní program

Masážní křeslo nabízí plně automatický počítačem řízený masážní program. Délka masážního programu je nastavitelná.

### Popis částí masážního křesla




## Instalace a příprava na použití



1. Otevřete balení masážního křesla a s pomocí čtyř lidí vyjměte kostru křesla (při manipulaci s křeslem buďte velmi opatrní, nepoužívejte hrubé síly).


2. Opatrně otočte opěrku zad. Pomocí přiložených šroubů a pojistných západek připevněte potah ke spodní straně zádové opěrky a pneumatický píst ke spodní části křesla (viz. obrázek).

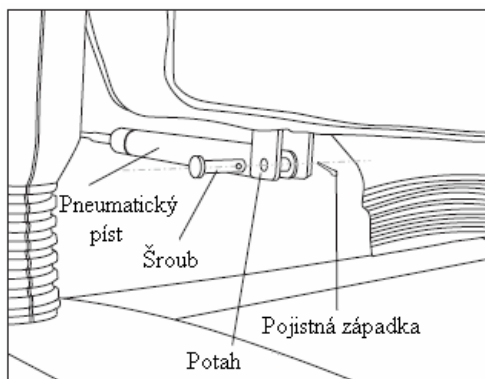


3. Najděte síťové přívody a pevně připojte zástrčky s odpovídajícími barvami.

4. Zajistěte okolo křesla dostatečný prostor, aby nedošlo ke kolizi s jinými předměty během nastavování úhlu opěrky nebo otáčení křesla.

5. Po dokončení instalace připojte síťový kabel do elektrické zásuvky a zapněte hlavní vypínač, který se nachází na pravé spodní části zádové opěrky. Poté již můžete pomocí ovládacího panelu vybrat požadované masážní funkce a užívat si komfortní relaxační masáž.

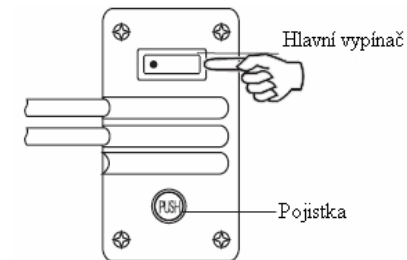


## Popis a přehled funkcí dálkového ovládání

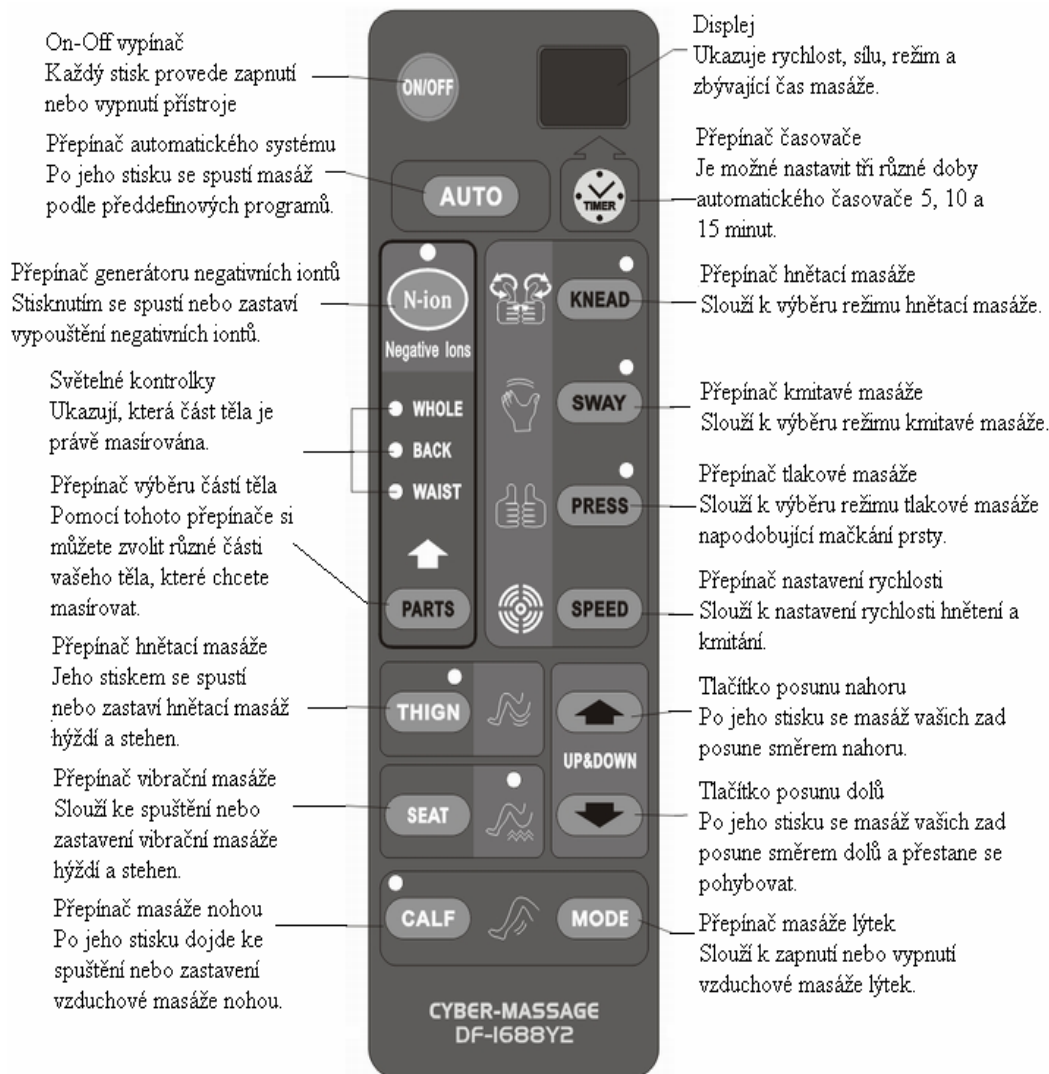


## Zásady správného používání masážního křesla


### I. Zapnutí masážního křesla

Na dálkovém ovládání masážního křesla stiskněte tlačítko . Tím dojde k zapnutí přístroje a masážní křeslo je připraveno k použití.

### II. Nastavení času masáže





Po zapnutí masážního křesla stiskněte tlačítko časovače  sloužící k nastavení doby masáže. Je možné vybrat mezi třemi časy: 5, 10 nebo 15 minut. Na displej můžete vidět nastavený čas.

### III. Automatický masážní program





Pokud požadujete automatický masážní program, pak stiskněte tlačítko , čímž dojde ke spuštění automatického režimu masáže. V tomto režimu je prováděna automatická masáž zad i nohou. Režim masáže je řízen počítačově podle přednastaveného schématu.

### IV. Masáž zad

#### 1) Volba stylu hnětení

Stiskněte tlačítko , čímž se spustí hnětací masáž zad. Obvykle je předpokládáno dráhou masážních hlavic celá zádová část, můžete si však pomocí tlačítka  zvolit požadovanou část zad, u které bude prováděna masáž. Můžete si také pomocí tlačítek  a  posunout hnětací hlavice na konkrétní požadované místo.

#### 2) Volba stylu kmitání

Stiskněte tlačítko , čímž se spustí kmitavá masáž zad. Obvykle je předpokládáno dráhou masážních hlavic celá zádová část, můžete si však pomocí tlačítka  zvolit požadovanou část zad, u které bude prováděna masáž. Můžete si také pomocí tlačítek  a  posunout masážní hlavice na konkrétní požadované místo.

### 3) Volba stylu mačkání prsty

Stiskněte tlačítko **PRESS**, čímž se spustí tlaková masáž zad napodobující mačkání prsty. Obvykle je předpokládánou dráhou masážních hlavice celá zádová část, můžete si však pomocí tlačítka **PARTS** zvolit požadovanou část zad, u které bude prováděna masáž.


### 4) Volba rychlosti masáže

Během probíhající masáže je možné pomocí tlačítka **SPEED** nastavovat rychlost hnětací nebo kmitavé masáže. Je možné volit mezi třemi rychlostmi. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka je možné nastavovat požadované rychlosti masáže. Na displeji pak můžete vidět nastavované rychlosti znázorněné znaky L1 až L3.

### 5) Výběr masážní oblasti

Stiskem tlačítka **PARTS** můžete volit mezi třemi různými oblastmi zad, na kterých chcete provádět masáž. Zvolená oblast je signalizována příslušnou světelnou kontrolkou.

- **Celá záda**  
Masáž bude prováděna na celé oblasti zad od krku až k pasu.
- **Ramena**  
Masáž bude prováděna pouze v oblasti od krku přibližně do poloviny zad.
- **Pas**  
Masáž bude prováděna pouze ve spodní polovině zad.

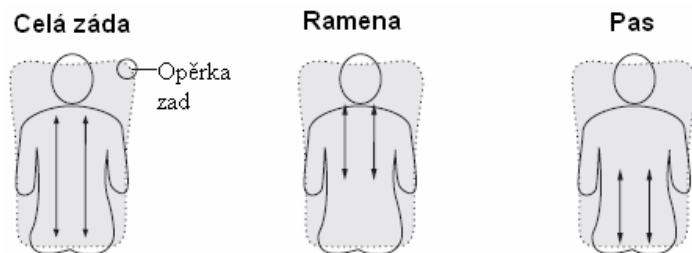

Stiskem a držením tlačítka **↑** nebo **↓** se budou masážní hlavice zádové části posouvat směrem nahoru nebo dolů. Po uvolnění tlačítka se zastaví na aktuálním místě a budou provádět bodovou masáž. Pro masážní režim mačkání prsty nelze nastavit bodovou masáž.

### V. Masáž hýždí a stehna

Stiskem tlačítka **THIGN** se spustí hnětací masážní mechanismus v sedáku, který poskytuje uvolňující masáž pro hýždě a stehna. Dalším stiskem tohoto tlačítka dojde k vypnutí masáže.

### VI. Masáž lýtek

Masážní mechanismus napodobuje ruční hnětací masáž lýtek. Tato masáž stimuluje krevní oběh v nohou, uvolňuje svaly na nohou a odstraňuje bolest.

Stiskem tlačítka **CALF** se aktivuje masáž lýtek. Dalším stiskem tohoto tlačítka dojde k vypnutí masáže lýtek.

Stiskem tlačítka **MODE** se nastavuje režim hnětací masáže. K dispozici jsou tři režimy, L1 až L3. Je tedy možný zvolit režim přesně odpovídající vašim požadavkům.

### VII. Nastavení úhlu zádové opěrky

Pokud si přejete sklopit zádovou opěrku, opřete se o zádovou opěrku a zatáhněte za páčku sloužící k nastavení sklonu zádové opěrky. Jakmile docílíte požadované polohy, uvolněte polohovací páčku a opěrka bude zajištěna v této poloze.

Pokud si přejete zvednout zádovou opěrku, jednoduše uvolněte zádovou opěrku (odkloňte se) a zatáhněte za polohovací páčku.

### VIII. Nastavení podnožek

Pro nastavení sklonu podnožky je třeba zatáhnout směrem nahoru za páčku umístěnou pod levou ruční podpěrkou. Pokud za tuto páčku zatáhnete směrem nahoru a přitom lehce nadzvednete nohy, podnožka se automaticky zvedne.

Pokud chcete podnožku opět sklopit, je třeba za ovládací páčku zatáhnout směrem nahoru a přitom lehce zatlačit nohama do podnožky. Tím začne podnožka pomalu klesat. (Obdobný mechanismus je například u kancelářských židlí.)





## Masážní křeslo DF1688Y2

Pokud chcete změnit délku podnožky, je třeba zatáhnout za ovládací páčku na pravé straně směrem nahoru. Poté nastavte požadovanou délku podnožky a ovládací páčku opět uvolněte. Nyní je podnožka s nově nastavenou délkou opět upevněna.

### IX. Ukončení používání masážního křesla

Po dokončení masáže prosím vypněte hlavní vypínač, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a ovládací panel umístěte do ochranného pouzdra umístěného pod pravou ruční opěrkou.


## Údržba a způsob uskladnění

- Příklad: Přístroj používejte nebo skladujte pouze na suchých a máloprašných místech.
  - Vlhkost a prach zkracují životnost masážního křesla a mohou být příčinami vzniku špinavých nebo plesnivých skvrn. 
- Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům nebo jej nenechávejte v blízkosti zařízení produkujících teplo, jako jsou například radiátory.
  - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo ke ztrátě jeho kvality. 
- Po skončení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač a napájecí kabel je odpojen z elektrické zásuvky. Při připojování nebo odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky nikdy nemějte mokré ruce.
  - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 
- Při čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, těkavé látky nebo bělidla.
  - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo k jeho úplnému zničení. 
- Pro čištění potahu používejte pouze jemný hadřík namočený ve vlažné vodě nebo mýdlovém roztoku. Po očištění potah řádně utřete do sucha.


## Masážní křeslo DF1688Y2

### Technické parametry

<b>Model:</b>	DF1688-Y2
<b>Napájení:</b>	AC 230V / 50Hz
<b>Spotřeba:</b>	130W
<b>Maximální doba masáže:</b>	15 minut
<b>Hmotnost:</b>	48kg
<b>Rozměry:</b>	1000 x 700 x 900 (V x Š x H)
<b>Bezpečnostní ochrany:</b>	Ochrana proti přehřátí, elektronický časovač

 Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:  
**Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno**  
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.  
 549 245 575; 602 766 759