

TYTO INSTRUKCE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

A70 CELOTĚLOVÉ VZDUCHOVÉ MASÁŽNÍ KŘESLO

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ



Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si návod pečlivě přečtěte, abyste se seznámili s jeho správným ovládáním. Zvýšenou pozornost věnujte obzvláště zvýrazněným bezpečnostním upozorněním a návod uschovejte pro další použití.

Pozn.: Naše společnost se vyhrazuje právo změnit design a popis produktu bez dalšího varování. Více informací naleznete v materiálech týkajících se dané barvy Vašeho produktu.

Obsah

Bezpečnost a údržba	3
Název a funkce jednotlivých komponentů.....	5
Funkce a účinnost	6
Způsoby použití.....	7
Technické informace	18

Bezpečnost a údržba

1.) Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nedovolte dětem dotýkat se pohyblivých částí tohoto produktu.
- K zapojení přístroje do elektřiny používejte pouze řádně uzemněný zdroj, který odpovídá požadavkům produktu.
- Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektřiny, abyste omezili riziko poškození přístroje či zranění.
- Produkt používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.
- Nepoužívejte žádné doplňky, které nejsou k tomuto produktu přímo určeny.
- Tento produkt není určen k venkovnímu použití.
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Použití přístroje jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, je zakázáno.
- Doporučená doba použití je 20 minut.
- Nepoužívejte, pokud je kůže poškozená.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený potah.
- Nepoužívejte, pokud je otvor chladiče přikrytý nebo zablokovaný.
- Dbejte na to, aby se dovnitř produktu nedostala cizí tělesa.
- Při používání produktu neusínejte.
- Pokud jste opilí nebo se necítíte dobře, produkt nepoužívejte.
- Produkt používejte nedříve hodinu po jídla.
- Nenastavujte masážní funkce na příliš vysoké hodnoty – předejdete tak možnému zranění.

2.) Prostředí vhodné k použití

- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že teplota prostředí se prudce mění.
- Nepoužívejte v prašném prostředí ani v blízkosti žíravín.
- Nepoužívejte v prostředí, kde není dostatek místa nebo dobré odvětrávání.

3.) Tento přístroj by neměly používat osoby, které:

- Trpí osteoporózou
- Mají srdeční onemocnění nebo elektronické stimulátory jako je pacemaker
- Mají horečku
- Těhotné ženy nebo ženy, které mají právě menstruaci
- Byly zraněny nebo trpí kožním onemocněním
- Které mají méně než 14 let nebo osoby mentálně neschopné ovládnutí produktu (tyto osoby by měly přístroj používat pouze pod dozorem zodpovědné osoby.)
- Mají od doktora nařízený klid nebo osoby, které se necítí dobře
- Tento produkt nepoužívejte ani v případě, že je Vaše pokožka mokrá!

4.) Bezpečnost

- Zkontrolujte, zda elektrické připojení odpovídá požadavkům přístroje
- Přístroje pod proudem se nikdy nedotýkejte mokrou rukou.
- Zabraňte tomu, aby se voda dostala dovnitř produktu. Mohlo by dojít ke zkratu nebo k poškození produktu.
- Chraňte dráty v produktu před poškozením a neměňte elektrické zapojení produktu.
- K čištění elektrických součástí produktu jako jsou vypínač nebo kabel nepoužívejte vlhké hadříky.
- Pokud dojde k výpadku elektřiny, držte se od produktu dál pro případ, že by se elektřina znovu zapnula a přístroj reagoval nepřiměřeně.
- Pokud se přístroj chová nečekaně, přestaňte ho okamžitě používat a poraďte se se svým distributorem.
- Pokud se v průběhu používání necítíte dobře, přestaňte ho používat a další použití konzultujte se svým lékařem.
- Tento přístroj by neměly bez dozoru a pomoci používat osoby se sníženými mentálními či fyzickými schopnostmi, osoby s poruchou některého ze smyslů nebo osoby, které nejsou o používání přístroje a jeho ovládání poučené. Pod dohledem by přístroj měly používat také děti.
- Dávejte pozor, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

5.) Údržba



- Údržbu a opravy tohoto přístroje by měl provádět pouze autorizovaný profesionál. Uživatelé nesmějí z bezpečnostních důvodů přístroj rozebírat ani opravovat.
- Nezapomeňte přístroj po použití odpojit z elektřiny.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte jakýkoliv problém se zástrčkou.
- Pokud produkt plánujete delší dobu nepoužívat, stočte kabely a skladujte v suchém a neprašném prostředí.
- Produkt neskladujte ve vysokých teplotách nebo blízko ohně a nevystavujte produkt dlouhému slunečnímu záření.
- Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo, benzény ani alkoholy.
- Jednotlivé součásti přístroje byly speciálně navrženy a vyrobeny – nepoužívejte proto žádné jiné.
- Při manipulaci s křeslem nepoužívejte ostré předměty.
- Tento produkt netahejte po nerovném povrchu. Před přesunem produktu jej zvedněte.
- Křeslo používejte po doporučenou dobu. Nepoužívejte dlouho bez přerušení.

6.) Řešení běžných problémů

- Vydávání zvuků v důsledku pohybu částí přístroje je přirozené.
- Pokud kontrola nefunguje normálně, zkontrolujte, jestli je přístroj zapojen do elektřiny pořádně a jestli je přístroj zapnutý.

- Po uplynutí doporučené doby použití se přístroj automaticky vypne. Pokud je produkt používán po delší dobu, kontrola přehřátí přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete znovu používat až po půl hodině.

Název a funkce jednotlivých komponentů

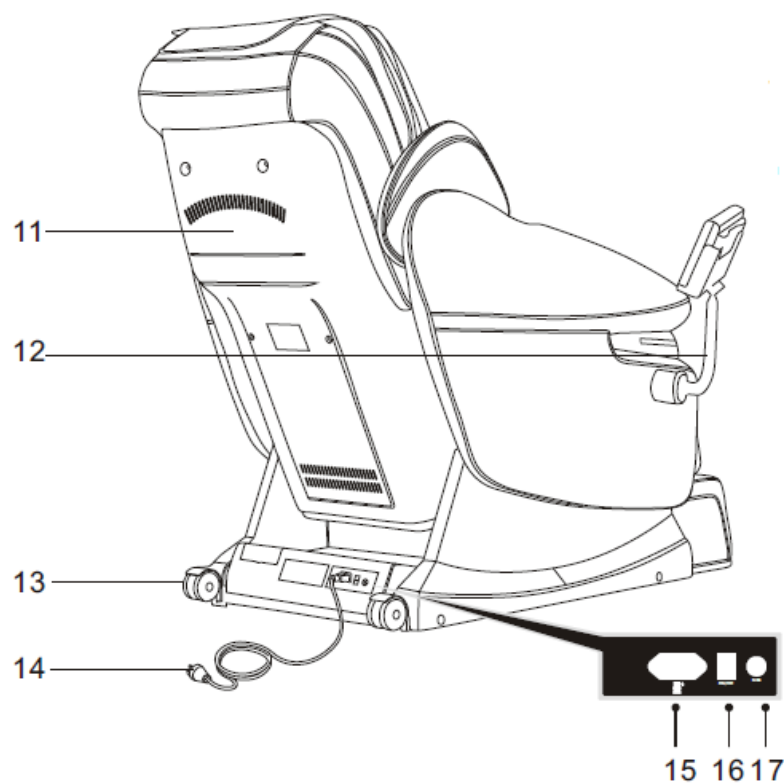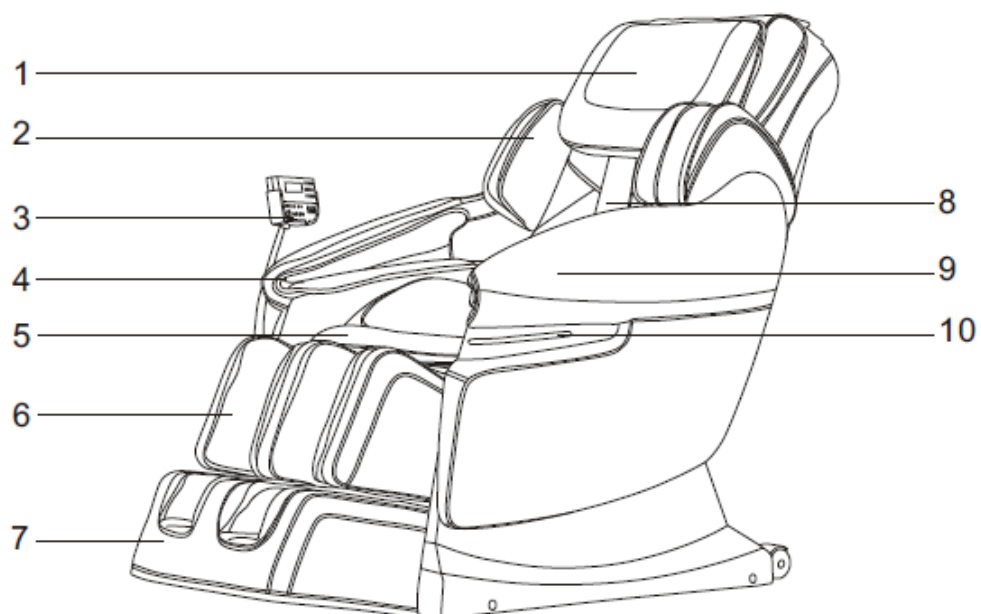

- 1.) Polštář pod hlavu
- 2.) Vzduchové vaky pro vrchní část paží
- 3.) Manuální ovladač
- 4.) Vzduchové vaky pro paže
- 5.) Sedací polštář
- 6.) Podpěra na nohy
- 7.) Podpěra na chodidla
- 8.) Zádový polštář
- 9.) Podpěra pro paže
- 10.) Modrý LED efekt
- 11.) Zadní kryt
- 12.) Držák manuálního ovladače
- 13.) Kolečko
- 14.) Elektrický kabel a zástrčka
- 15.) Vstup elektrického kabelu
- 16.) Vypínač elektřiny
- 17.) Pojistky

Funkce a účinnost


Funkce

- Masážní mechanismus je prováděn čtyřmi pohyblivými koly, které se pohybují nahoru a dolů.
- Možnost pěti druhů masáže: shiatsu, hnětení, poklepávání a kombinace hnětení a poklepávání a KNOCKING.
- Automatické určení pozice ramen
- Funkce uložení dvou nastavení masážních parametrů
- 4 různé masážní funkce (auto, celotělová masáž tlakem vzduchu, houpání boky, protahování pasu).
- Automatické možnosti masáže vrchní části těla: celá záda, ramena a krk, spodní část zad
- Manuální možnosti nastavení masáže vrchní části těla (tři možnosti nastavení: celková, částečná, fixovaná. U každé z možností výběr mezi třemi rychlostními stupni. Ve fixním režimu se mohou masážní hlavice pohybovat nahoru a dolů, u poklepávání, shiatsu a klepání je na výběr mezi třemi šířkami vzdálenosti mezi hlavicemi: široká, střední, úzká.
- Masáž využívající tlak vzduchu: tři režimy pro paže, hýždě a podpěry nohou – 3 různé intenzity u všech režimů (Když je zapnutá tlaková masáž noh a hýždí, jedná se o masáž tlakem vzduchu spodní části těla.)
- Válečky pro masáž nohou: 3 nastavitelné úrovně.
- Podpěra pro lýtku je nastavitelná tak, aby bylo křeslo pohodlné pro lidi různých výšek.
- Převrátitelná funkce podpěr pro paže, aby křeslo bylo použitelné lidmi různých výšek.
- Vysoká polohovatelnost pro Vaše maximální pohodlí.
- Obnovení masážních mechanismů po vypnutí křesla.
- VFD zobrazování.
- Modré LED efekty na podpěrách pro paže.


Účinky:

- Úleva od únavy
- Podpora krevního oběhu
- Uvolňuje napjaté svaly
- Uvolňuje bolesti nervového původu
- Uvolňuje bolesti svalového původu


Způsoby použití

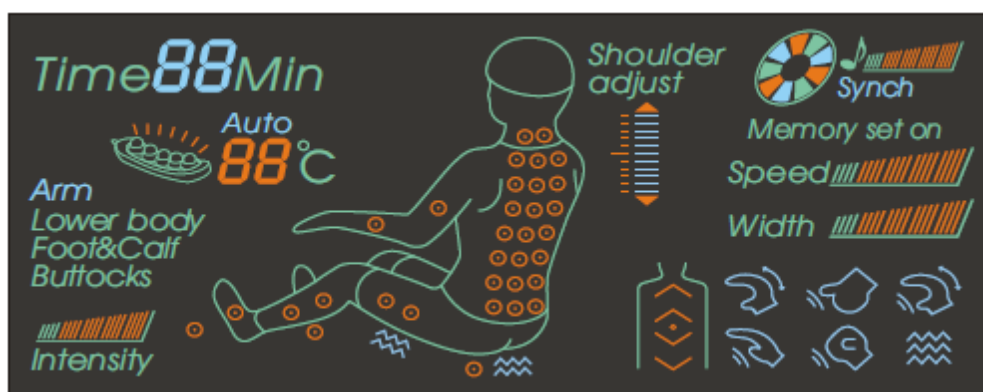

Poznámka: obrázek je pouze referenční

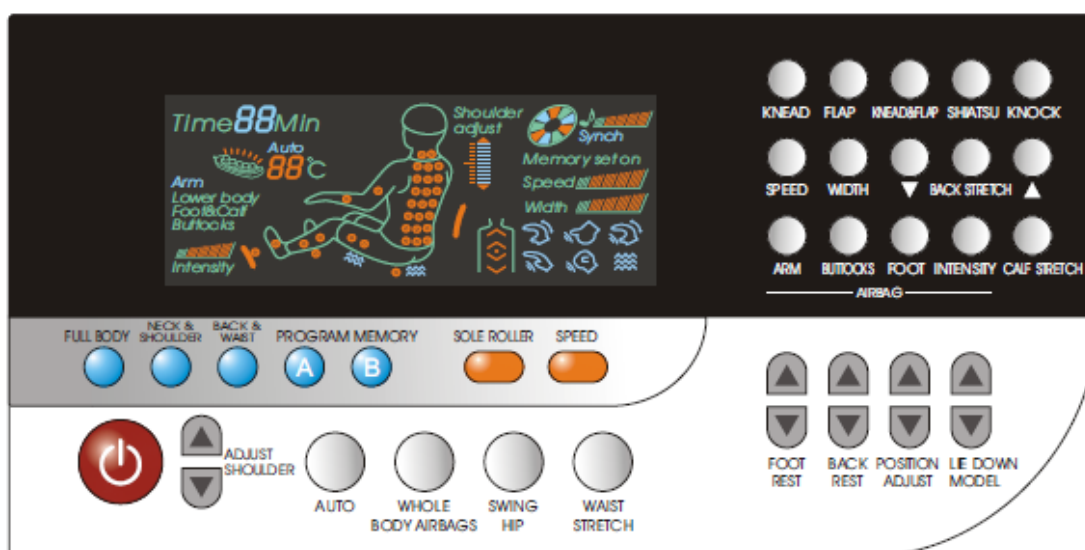


1.) Zapněte přívod energie do přístroje

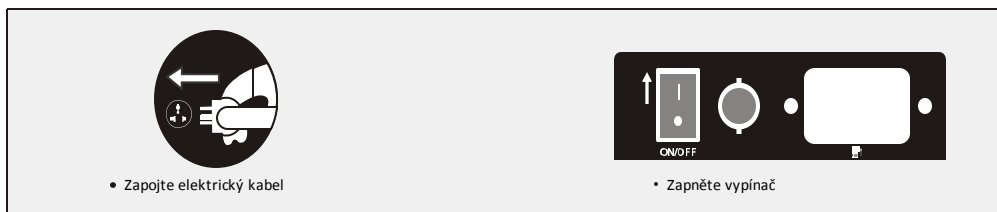

2.) Použití manuálního ovladače

A) Zapnutí masážní funkce

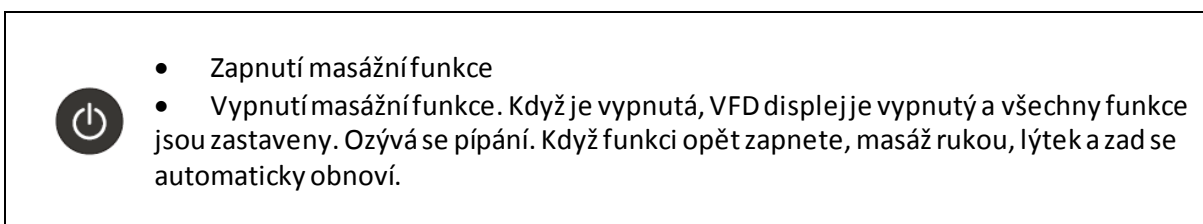


B) Začátek masáže

- Pro odstartování masáže stiskněte červené tlačítko. Masážní křeslo se automaticky položí.
- Nejdříve se otestuje poloha masážních bodů a ramen. Po testování se ozve zvukové upozornění. Poté můžete upravit pozici ramen pomocí tlačítek nahoru a dolů podle Vaší výšky. Když úpravy nejsou potřebné, do 5-10 vteřin se masáž automaticky odstartuje.
- Nastavení pozice ramen

	Šipkou nahoru upravíte pozici ramenních hlavic směrem nahoru.
	Šipkou dolů upravíte pozici ramenních hlavic směrem dolů.

- Vhodná pozice:

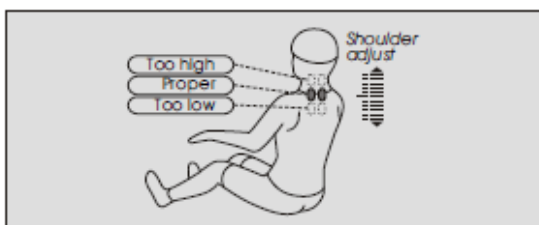

3.) Výběr masážní funkce

- Funkce uložení masáže do paměti
- V průběhu procesu masáže můžete mezi dvěma uloženými masážními nastaveními libovolně přepínat. Stačí, když stisknete jedno z tlačítek A nebo B

4.) Automatická masáž

Tlačítko	Popis	Displej
	Uvolňující masáž: uvolňuje svaly a kosti	Auto A1
	Relaxační masáž: podporuje krevní oběh	Auto A2
	Masáž pro úlevu od bolesti: masáž shiatsu bodů, která ulevuje od bolesti	Auto A3
	Regenerace, masáž proti únavě: zlepšuje celkový stav, pomáhá při únavě, obnovuje vitalitu	Auto A4

Poznámka: Mezi těmito druhy masáží přepínáte opakovaným stiskem tlačítka MODE. Tlačítka se cyklicky přepínají.

- Charakteristika masáží

Tlačítko	Popis	Displej
	Celotělová masáž tlakem vzduchu: ramena, pas, hýždě, nohy – všechny tyto části jsou masírovány tlakem vzduchu ve stejnou dobu.	Auto A5
	Pohupování boky: Masáž se soustředí na boky a hýždě. Vzduchové polštáře pracují tak, aby se hýždě pohupovali doprava a doleva.	Auto A6
	Natažení pasu: nohy jsou masírovány tlakem vzduchu, jsou tisknuty. Opěrka na záda je položena. Podpěra na lýtky je stažena dolů, aby byl pas natažen. Tato akce se opakuje. Sedací polštář a masáž rukou pracují společně.	Auto A7

- Masáže vrchní části těla

Tlačítko	Popis	Displej
	Masáž celých zad: masáž se soustředí na celou horní oblast těla	Auto F1
	Masáž krku a ramen: masáž se soustředí na šíji a krk	Auto F2
	Záda a oblast pasu: masáž se soustředí na záda a pas	Auto F3

- Váleček na chodidla

Tlačítko	Popis	Displej
	Váleček na chodidla: zapínání	
	Ovládání rychlosti pohybu válečku, k dispozici jsou tři rychlosti.	

6.) Manuálně ovládané masáže

Tlačítko	Popis	Displej
 KNEAD	Hnětení: manipulační masáž, nastavitelná rychlost i intenzita	
 FLAP	Proklepávání: manipulační masáž, nastavitelná rychlost i intenzita	
 KNEAD&FLAP	Hnětení a proklepávání: manipulační masáž, nastavitelná rychlost i intenzita	
 SHIATSU	Shiatsu: manipulační masáž, nastavitelná rychlost i intenzita	
 KNOCK	Klepání: manipulační masáž, nastavitelná rychlost i intenzita	
 SPEED	Rychlost: 5 nastavitelných úrovní	Speed 
 WIDTH	Šířka: 3 nastavitelné úrovně (u proklepávání a shiatsu)	Width 

Tlačítko	Popis	Displej
 BACK STRETCH	Masáž na stálém bodě, fixovaná	
 BACK STRETCH	Částečná masáž menší oblasti, pohyb tam a zpět	
 BACK STRETCH	Masáž vrchní části těla (celá záda), pohyb tam a zpět	
 DOWNWARD BUTTON	Tlačítko dolů: u fixované masáže a u masáže částečné můžete natavit masážní body. Tímto tlačítkem je posouváte směrem dolů.	
 UPWARD BUTTON	Tlačítko nahoru: u fixované masáže a u masáže částečné můžete natavit masážní body. Tímto tlačítkem je posouváte směrem nahoru.	

7.) Masáž tlakem vzduchu

	Popis
 ARM	Vzduchová masáž paží, zapnutí a nastavení intenzity (vše v jednom tlačítku)
 BUTTOCKS	Vzduchová masáž hýždí – zapnutí/vypnutí
 FOOT	Vzduchová masáž nohou – zapnutí/vypnutí
 INTENSITY	Nastavení intenzity vzduchové masáže nohou a hýždí - 3 stupně intenzity
 CALF STRETCH	Natažení lýtek – když je zapnutá vzduchová masáž v této oblasti, stiskněte pro zapnutí/vypnutí této funkce.

Pozn.: Pokud jsou zapnuty masáže hýždí a nohou, jedná se o masáž spodní části těla.

8.) Nastavení úhlu podpěr

Název	Tlačítko	Popis
Podpěra na nohy		Tlačítko pro zvedání podpěry na nohy: po stisku tohoto tlačítka se podpěra zvedá a přestane, když tlačítko znovu pustíte.
		Tlačítko pro spouštění podpěry na nohy: po stisku tohoto tlačítka se podpěra spouští a přestane, když tlačítko znovu pustíte.

Podpěra na záda		Tlačítko pro zvedání podpěry na záda: po stisku tohoto tlačítka se podpěra zvedá a přestane, když tlačítko znovu pustíte.
		Tlačítko pro spouštění podpěry na záda: po stisku tohoto tlačítka se podpěra spouští a přestane, když tlačítko znovu pustíte.

Nastavení polohy		Tlačítko pro propojené vzpřímení: stiskněte tlačítko. Opěrka na záda se pomalu zvedá a podpěra na nohy klesá.
		Tlačítko pro propojené položení: stiskněte tlačítko. Opěrka na záda pomalu klesá a podpěra na nohy se zvedá.

Model položení	 	Model položení: dohromady 4 stupně. Každým stisknutím se polohy budou cyklicky měnit.
----------------	--	---

3. Ukončení masáže a vypnutí

- Pokud masáž stále probíhá, stiskněte červené tlačítko. Všechny masážní funkce se zastaví. Podpěra na nohy a opěradlo na záda se automaticky vrátí do původního stavu. Pokud uběhne nastavená doba masáže, zastaví se masážní funkce, ale poloha opěradla a podpěry se nevrátí do původní pozice.
- Když uběhne nastavená doba masáže, na displeji ovládání se objeví zpráva „memory set on“ (uložení do paměti), která Vám připomene možnost uložit aktuální nastavení jako režim A nebo B. Po stisku červeného tlačítka se přístroj vypne a masážní hlavice se vrátí do původní polohy. Pokud s přístrojem nebudete 10 vteřin nijak manipulovat, vypne se p uběhnutí nastaveného času automaticky a masážní hlavice se vrátí do výchozí pozice.



Zpráva o možnosti uložení nastavení do paměti

Vypojení z elektřiny:



Pozice vypínače

Odpojení kabelu

4. Instrukce k instalaci sedáku

- Najděte vzduchovou trubicu na levé spodní straně sedacího rámu a pořádně ji připevněte podle barvy. Pozn.: tři vstupní trubice v sedáku musí dostat přes ocelové trubičky 20*10 uprostřed rámu sedáku.
- Zarovnejte dva kovové špunty pod sedadlem s trubicí 20*10 uprostřed sedacího rámu. Sedací polštář posuňte dozadu, abyste se ujistili, že kovové knoflíky a 20*10 kovové trubice jsou zapojeny správně tak, aby kruhová otvor na pravém konci sedáku byl zarovnán se závitovým otvorem na kovové trubici na pravé straně sedacího rámu. Pozn.: Než zatlačíte sedák dozadu, narovnejte přívodní hadici v sedáku. Dávejte pozor, aby se nezasekla nebo neucpala ocelovou trubicí 20*10. (Obr. 2)

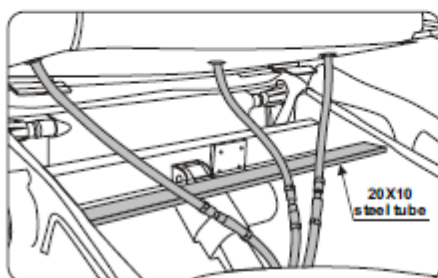


Figure 1

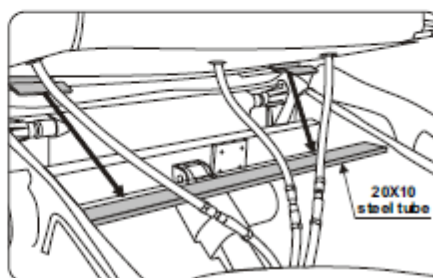


Figure 2

- Instalujte kloubní prstenec a křížový kotoučový šroub na kulatý otvor v pravé zadní části sedadla a utáhněte je. (Obr. 3)
- Zapněte zip na spodní zadní části zádového polštáře a zadní části sedáku a stáhněte spodní část zádového polštáře tak, aby byl narovnaný. (Obr. 4)

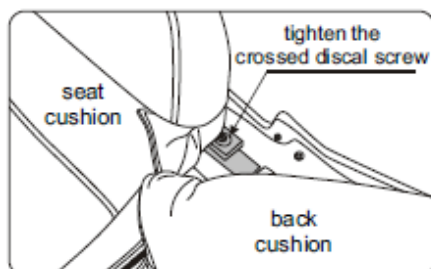


Figure 3

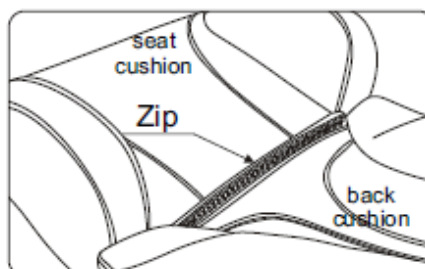


Figure 4

- Upravte vrchní část na držení ramen a ukončete instalaci sedáku a vrchní části podpěr na ruce. (Obr.5)

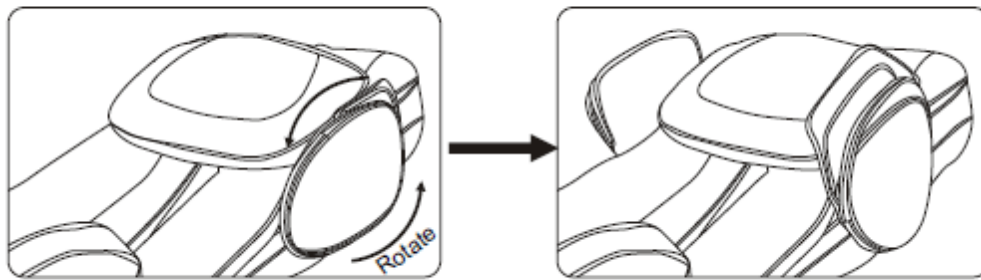


Figure 5

5. Instrukce k instalaci podpěr na ruce

- Najděte odpovídající vzduchovou trubici a konektor na spodní straně sedacího rámu a podpěr na ruce, který k ní налеží. Protáhněte ho čtvercovým otvorem na pevném kovovém plátu. (Obr. 1)
- Po tom, co konektor protáhnete daným otvorem, zapojte jej. (obr. 2)

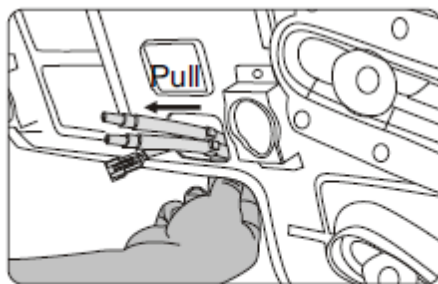


Figure 1

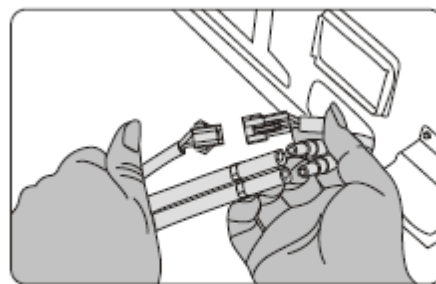


Figure 2

- Vytáhněte příčný spoj ze spodní části sedacího rámu a zapojte ho do konektoru na podpěře na ruce, stejně tak. Do odpovídajícího konektoru zapojte také vzduchovou trubici. (Obr. 3)
- Poté, co je zapojení dokončeno, vsuňte spoj do spodní části sedacího rámu skrze čtvercový otvor na upevněném kovovém plátu. Dávejte pozor, aby se vzduchová trubice neohnula.

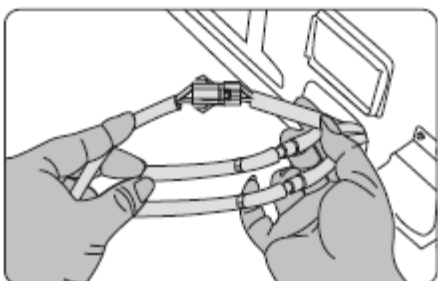


Figure 3


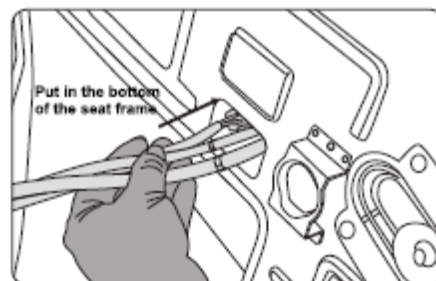


Figure 4

- Zpárujte vystouplé kolíky na podpěře do otvorů v upevněném plátu. Obrys kovového plátu by měl sedět s konkávním obrysem podpěry. (obr. 5)
- Držte podpěru a srovnejte dva výstupky na podpěře s otvory na kovovém plátu. (Dejte pozor, aby spojovací kabely a trubice byly na spodku rámu, jinak by s mohli přiskřípnout či zaseknout.). Zasaďte celou podpěru na pevný kovový plát.

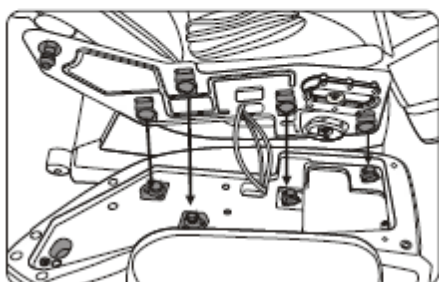

Obrázek 5

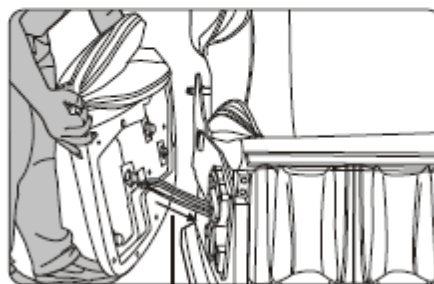



Figure 6

Pozn.: vše musí být zastrčeno pod sedák, jinak by mohlo dojít ke skřípnutí nebo zaseknutí.

- Po zasazení podpěry na ruce do kovového plátu, přitlačte podpěru směrem dolů tak, aby do sebe jednotlivé výstupky zapadly. Poté Opatrně popotáhněte podpěru směrem k sobě, abyste zjistili, jestli všechny spoje sedí.
- Najděte montážní otvor na přední straně kovové desky a zašroubujte vnitřní osmiúhelníkový šroub a plochou podložku pomocí vnitřního šestihyraného klíče. (Obr. 8)




Figure 7

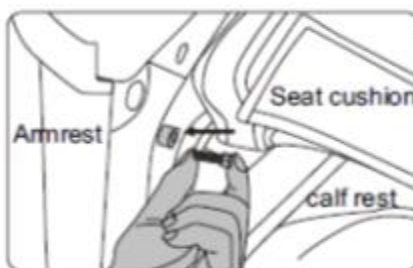

Utaže šestihyraného šroubu na přední straně podpěr

Figure 8

- Najděte horní montážní otvor na konci kovové desky. Použijte vnitřní hexagonální šroub a pevně ho zašroubujte. Tím je instalace podpěr na ruce ukončena. Obě podpěry se instalují stejným způsobem.
- Konec instalace – obrázek 10.

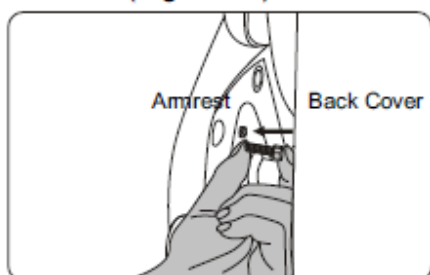

Hexagon screw fixed figure of armrest back part

Figure 9


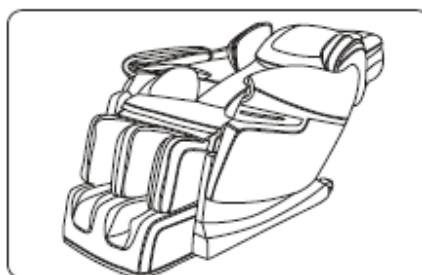


Figure 10

6. Instalace manuální ovladače

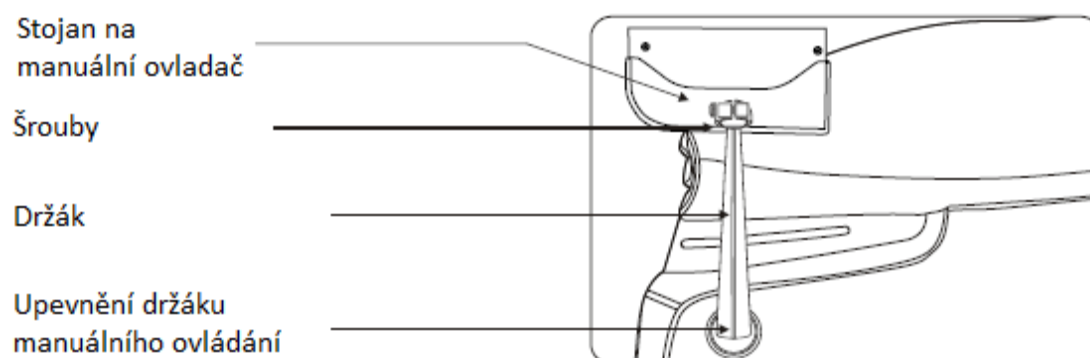

- Připravte si část potřebnou k zapojení držáku manuálního ovladače. (Obr. 1)
- Vložte konec držáku do pevného cylindrického otvoru. Otvory k zafixování by se měli na obou částech překrývat. (Obr. 2)

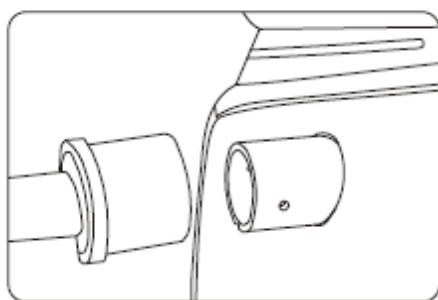


Figure 1

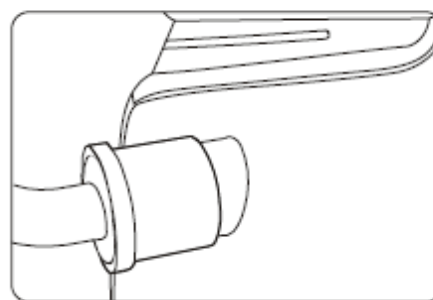


Figure 2

- Připravte si šrouby, kterými držák na obou stranách zafixujete. (Obr. 3)
- Utáhněte tyto šrouby na obou stranách. Tím ukončíte instalaci. (Obr. 4)

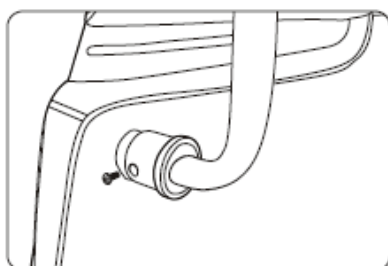


Figure 3


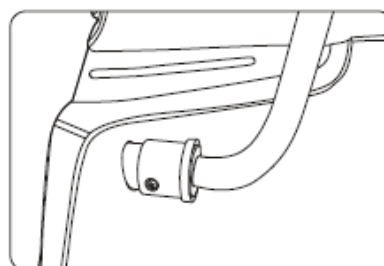


Figure 4


7. Použití a instalace ovladače

Vložte manuální ovladač do stojanu (obr. 1.). Stojanem lze volně otáčet doprava a doleva. (Obr. 2) a ovladačem lze také pohybovat v horizontálním směru. (Obr. 3)

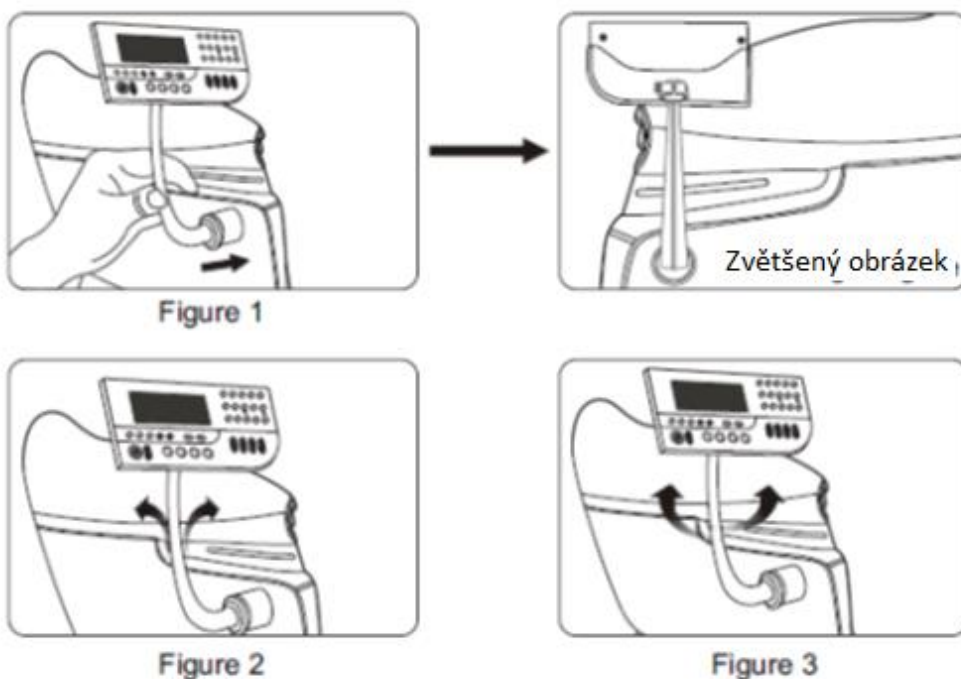


8. Rozkládání a použití polštáře po hlavu a za záda

Intenzitu hnětení můžete zmírnit pomocí použití polštáře za záda a pod hlavu, které je volitelné použití se doporučuje. Zádový polštář připevníte pomocí zipu (1), polštář pod hlavu zase pomocí upevňovacího prvku (2).

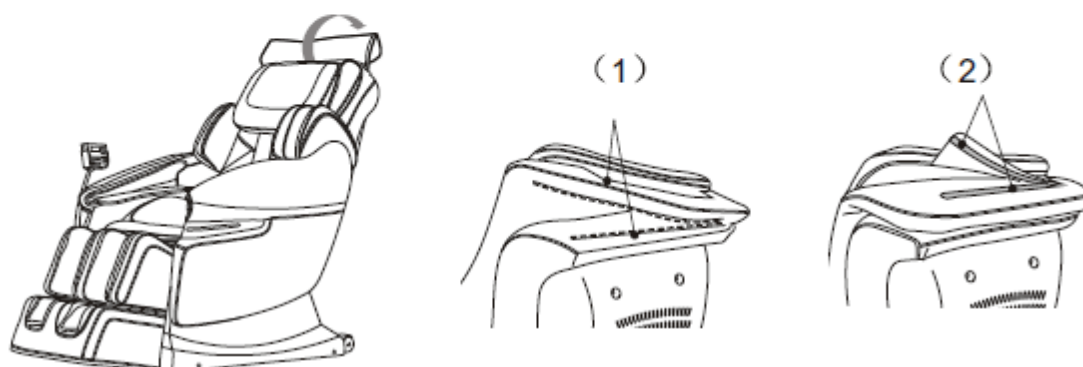

9. Jak křeslem pohybovat


Ujistěte se, že žádný z drátů neleží na zemi. Nahněte křeslo tak, že jej budete držet za zadovou část tak, aby těžiště přístroje spočívalo na jeho kolečkách. Nyní můžete křeslem posouvat dopředu a dozadu. Když křeslo dostanete do požadované pozice, položte jej opatrně zpět na zem.

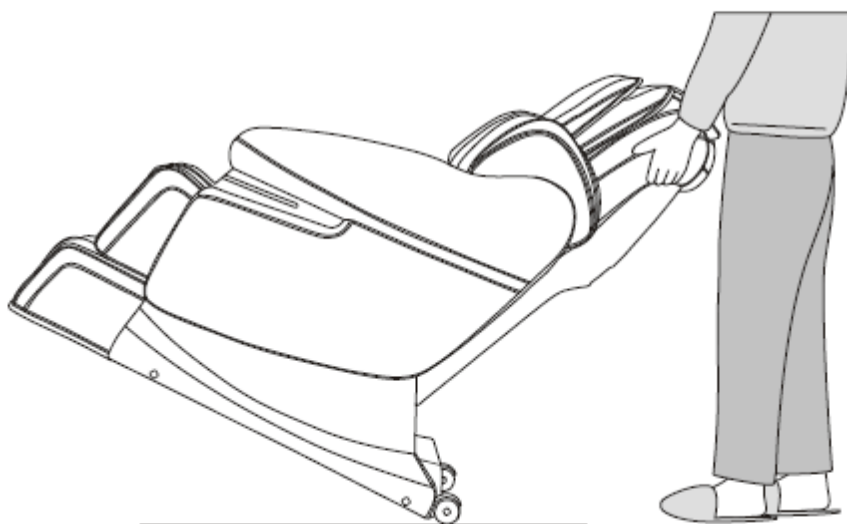

10. Ochrana podlahy

Když necháte toto křeslo položené na dřevěné podlaze, může dojít k poškození podlahy. Proto pod křeslo doporučujeme dát koberec.

Upozornění: Pokud je podlaha nerovná, křeslo po ní netahejte ani na kolečkách. Křeslem taktéž nemanipulujte v úzkém prostoru. K uzvednutí křesla jsou potřební dva lidé.

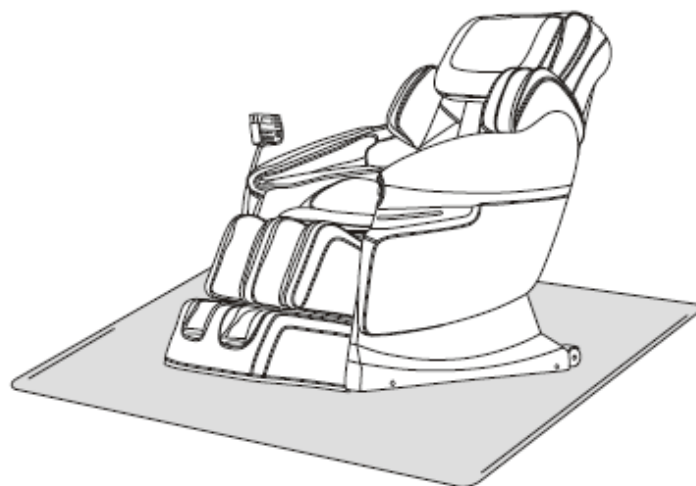

Technické informace:

Model: A70

Popis: Křeslo určené k celotělové masáži vzduchem

Provozní napětí: 110-120 V ~60Hz

220-240V ~50Hz/60Hz

Provozní příkon: 180W

Provozní doba: 15 minut

Bezpečnostní design: Třída I

Použitý materiál:

PVC, PA, ocelové součásti, elektrické a elektronické součásti.

MATERIÁL	PU	KŮŽE	TKANINA	DŘEVO