

Luxusní masážní křeslo

SL-A08-3

-

Návod k použití



Obsah

ÚVOD.....	3
1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	4
1.2. PROSTŘEDÍ POUŽÍVÁNÍ KŘESLA.....	4
1.3. OSOBY, KTERÝM NENÍ DOVOLENO KŘESLO POUŽÍVAT.....	4
1.4. BEZPEČNOST PROVOZU PŘÍSTROJE.....	5
1.5. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE.....	5
1.6. ODSTRAŇOVÁNÍ DROBNÝCH ZÁVAD.....	6
2. POPIS KŘESLA A PŘEHLED FUNKCÍ.....	6
2.1. POHLED ZEPŘEDU.....	6
2.2. POHLED ZE ZADU.....	7
2.3. FUNKCE KŘESLA.....	7
3. POUŽÍVÁNÍ MASÁŽNÍHO KŘESLA.....	8
3.1. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU.....	8
3.2. FUNKCE OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK.....	9
3.3. PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ.....	10
3.4. NASTAVENÍ OPĚREK KŘESLA.....	10
3.5. PŘÍPRAVA MASÁŽE.....	11
3.5.1. NASTAVENÍ POZICE RAMEN (ADJUSTMENT OF SHOULDER POSITIONS).....	12
3.6. PROVÁDĚNÍ MASÁŽE, POZASTAVENÍ MASÁŽE (RUNNING/PAUSE SWITCHING).....	12
3.7. NASTAVENÍ INTENZITY MASÁŽE (STRENGTH).....	13
3.8. AUTOMATICKÁ MASÁŽ (AUTOMATIC MASSAGE).....	14
3.9. MANUÁLNÍ MASÁŽ S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ RYCHLOSTI (MANUAL MASSAGE WITH SPEED)....	15
3.10. TECHNIKY MANUÁLNÍCH MASÁŽÍ (MANUAL MASSAGE METHODS).....	15
3.11. MANUÁLNÍ MASÁŽ - PROTAŽENÍ ZAD (MANUAL MASSAGE BACK STRETCHING).....	16
3.12. MANUÁLNÍ MASÁŽ SYNCHRONIZOVANÁ S HUDBOU (MANUAL MASSAGE MUSIC SYNCHRONIZATION).....	17
3.13. MASÁŽ VZDUCHOVÝM POLŠTÁŘEM (PNEUMATIC MASSAGE).....	17
3.14. VIBRAČNÍ MASÁŽ (VIBRATION).....	18
3.15. TERMOTERAPIE (THERMOTHERAPY).....	19
3.16. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY (MUSIC PLAY).....	20
3.17. PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ (PICTURE).....	20
3.18. PŘEHRÁVÁNÍ FILMŮ (MOVIE).....	21
3.19. KALENDÁŘ A HODINY (CALENDAR AND CLOCK).....	22
3.20. SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (SYSTEM SETUP).....	22
3.20.1. Ověření dotykového displeje.....	24
4. POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....	24
5. VYPNUTÍ KŘESLA, ODPOJENÍ Z NAPÁJENÍ.....	25
6. MONTÁŽ MASÁŽNÍHO KŘESLA.....	25
6.1. INSTALACE OVLÁDACÍHO PANELU.....	25

Masážní křeslo SL-A08-3 – Návod k použití

6.2. SESTAVENÍ OPĚRKY HLAVY A ZAD	26
6.3. INSTALACE OPĚRKY RUKOU	26
7. BEZPEČNÁ MANIPULACE S KŘESEM.....	27
7.1. PŘEMÍSTOVÁNÍ KŘESLA	27
7.2. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ.....	27
8. TECHNICKÉ PARAMETRY.....	28
9. DALŠÍ INFORMACE A KONTAKT NA PRODEJCE	28

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny. Jen tak budete moci zcela využívat všech výhod a předností tohoto přístroje.

Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího upozornění.

Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí!

V případě jakýchkoliv nejasností, týkajících se používání výrobku, se neváhejte obrátit na Vašeho prodejce. Kontakt naleznete na poslední straně tohoto Návodu.

1. Bezpečnostní opatření



- Nedovolte dětem dotýkat se pohyblivých částí výrobku.
- Pro napájení křesla používejte pouze dobře uzemněný zdroj napětí.
- Po použití, nebo před čištěním křesla vždy vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli zranění, nebo poničení výrobku.
- Křeslo používejte pouze v souladu s instrukcemi, uvedenými v tomto návodu.
- Používání jakýmkoliv jiným způsobem, než v návodu uvedeným, je zakázáno.
- Nepoužívejte žádné součásti, nebo přídatná zařízení, nedoporučená výrobcem.
- Křeslo není možné používat ve venkovním prostředí.
- Pro souvislé používání křesla je maximální doporučená doba používání 20 minut.
- Nestrkejte žádné předměty do vnitřních částí křesla.
- Zajistěte, abyste v křesle při jeho používání neusnuli.
- Nepoužívejte masážní funkce na příliš intenzivní stupně, abyste si nepřivodili zranění.

Nepoužívejte křeslo, pokud:

- je kožený potah natržený, nebo poškozený;
- je topné těleso křesla zakryto, nebo blokováno;
- jste opilí, nebo se necítíte dobře;
- jste minimálně hodinu po obědě.

1.2. Prostedí používání křesla

- Nepoužívejte křeslo v prostředí s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí (například v koupelně).
- Nepoužívejte křeslo bezprostředně poté, co se výrazně změnila teplota okolního prostředí.
- Nepoužívejte křeslo v extrémně prašném prostředí, nebo prostředí s leptavými látkami.
- Nepoužívejte křeslo v místnostech, kde není dostatek prostoru a dostatečná ventilace.

1.3. Osoby, kterým není dovoleno křeslo používat

Dále uvedení uživatelé by masážní křeslo neměli používat nebo musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:

- Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře.
- Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor.
- Osoby trpící srdečními chorobami nebo používající kardiostimulátor.
- Osoby trpící osteoporózou.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace.
- Ti, kteří mají od svého lékaře nařizenu léčbu klidem.

- Ti, kteří mají problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře.
- Ti, kteří mají horečku nebo mají zvýšenou citlivost na teplo.
- Osoby s kožními problémy.
- Děti mladší 14 let.
- Osoby psychicky nevyrovnané nesmí přístroj používat bez stálého dozoru.
- Osoby, jejichž tělo je mokré, nesmí používat toto masážní křeslo.

1.4. Bezpečnost provozu přístroje

- Před zahájením používání zkontrolujte, zda zdroj napětí má specifikaci požadovanou výrobkem.
- Při zapojování napájecího kabelu nemějte mokré ruce.
- Zamezte vniknutí vody do vnitřních částí křesla - mohlo by dojít k elektrickému zkratu a tím zničení celého přístroje.
- Vyvarujte se poškození napájecího kabelu.
- Neměňte sami vnitřní okruhy křesla.
- Pro čištění elektrických součástí (vypínače, zástrčky, aj.) nepoužívejte vlhkou látku.
- Při náhlém výpadku elektrického proudu udržte dostatečnou vzdálenost od křesla, abyste zabránili zranění v případě náhlého obnovení dodávek proudu.
- Ihned přerušete používání přístroje, pokud bude jeho činnost abnormální a kontaktujte servisní centrum prodejce (kontakt na poslední straně návodu).
- Ihned přerušete používání přístroje, pokud budete pociťovat nevolnost. Další používání konzultujte s Vaším lékařem.

1.5. Údržba přístroje

- Opravy tohoto přístroje může provádět pouze servisní centrum prodejce. Uživatelům je zakázáno demontovat, nebo opravovat jakékoliv součásti.
- Po ukončení každého používání křesla nezapomínejte odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že je elektrická zásuvka poškozena.
- V případě, že přístroj nebude delší dobu používán, smotejte napájecí kabel a přístroj uložte na bezpečném suchém a bezprašném místě.
- Nepřechovávejte přístroj v prostředí s vysokými teplotami, v blízkosti ohně a zamezte jeho dlouhodobému vystavování přímému slunečnímu záření.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla, benzen, ani přípravky na bázi alkoholu.
- Mechanické součásti přístroje jsou vyráběny a navrženy velmi specificky, a proto vyžadují také specifickou údržbu.
- Nepřemisťujte křeslo používáním ostrých hranatých předmětů.
- Netlačte ani nepojíždějte s křeslem po nerovném povrchu. Vždy jej zvedněte do vzduchu.

- Přístroj používejte přerušovaně. Vyhněte se souvislému dlouhodobému náročnému zatěžování přístroje.

1.6. Odstraňování drobných závad

- Mějte na paměti, že křeslo používá mechanických pohyblivých součástí - počítejte tedy, že při provozu budete slyšet tyto zvuky.
- Pokud ovladač křesla nebude fungovat správně, zkontrolujte správnost jeho zapojení do křesla a ujistěte se, že křeslo je zapnuté.
- Pokud je dosaženo času konce masáže, křeslo se automaticky vypne.
- Pokud bude křeslo používáno souvisle po dlouhou dobu, teplotní čidlo může křeslo automaticky vypnout, aby zabránilo jeho poškození. Opětovné používání křesla je pak možné až po přibližně půl hodině, kdy přístroj vychladne.


Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, pohybovými a mentálními dispozicemi, nebo osoby nepoučené o používání přístroje bez dozoru zkušené osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost.

Používání výrobku dětmi je možné pouze za dozoru poučené osoby. Výrobek nesmí být používán dětmi jako hračka.


Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je možné ho vyměnit pouze v servisním středisku prodejce, aby nedošlo ke vzniku rizika poranění uživatele.

2. Popis křesla a přehled funkcí

2.1. Pohled zepředu

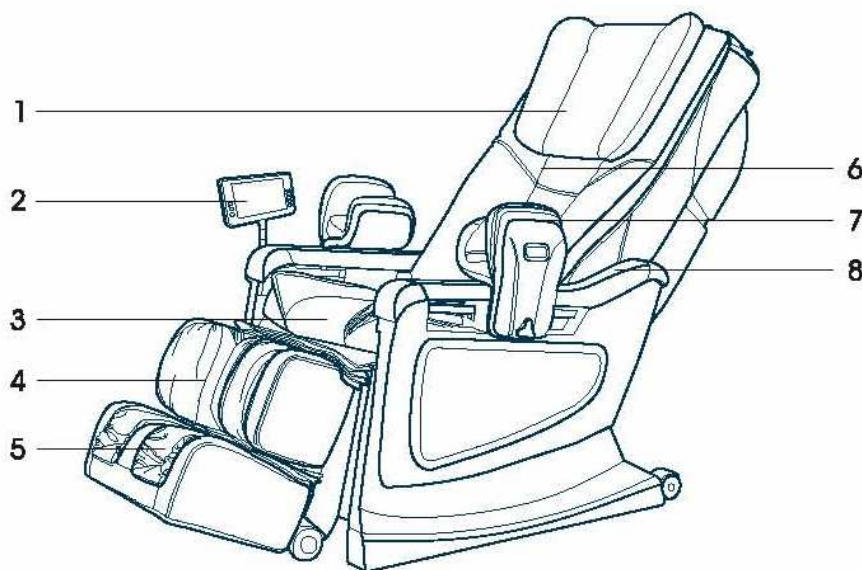

2.2. Pohled zezadu

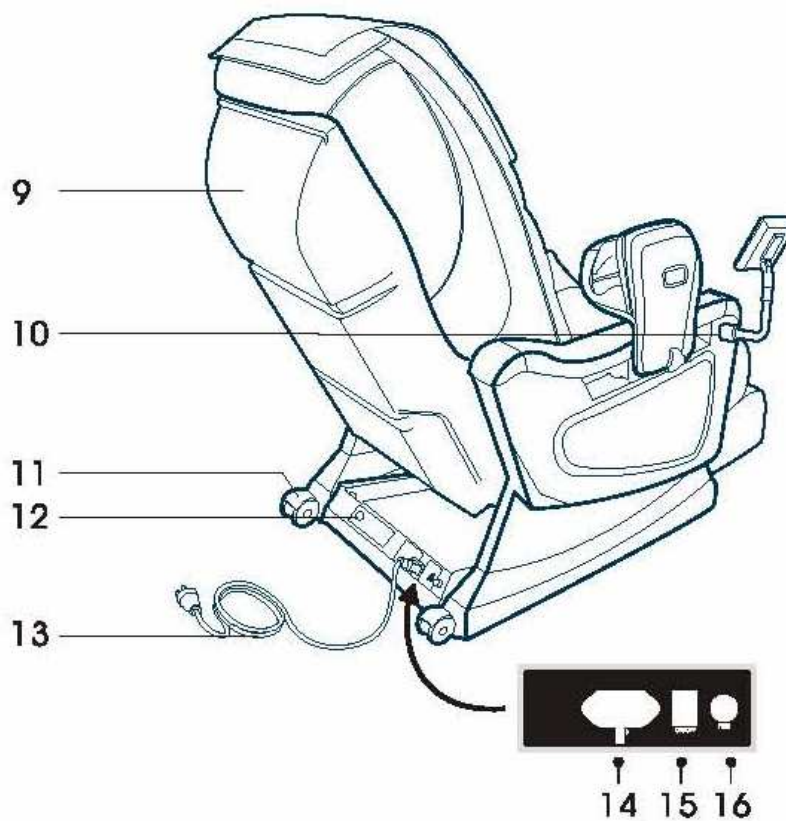

1. Polštář 2. Dálkové ovládání 3. Poduška 4. Lýtčková opěrka 5. Opěrka chodidel 6. Zádová opěrka 7. Pažní vzduchové polštáře 8. Opěrka rukou 9. Kryt zádové opěrky 10. Držák dálkového ovládání 11. Zadní pojezd 12. Pouzdro na dálkové ovládání 13. Kabel se zástrčkou 14. Zásuvka 15. Přepínač 16. Pojistková skříň

2.3. Funkce křesla

- Křeslo je vybaveno uživatelsky přívětivým barevným dotykovým displejem s mnoha integrovanými funkcemi - například ovládání masáží, hudby, videa, prohlížení obrázků, aj.. Toto dálkové ovládání je bezdrátové.
- 3D systém masážních hlav se 4 kolečky pohybujícími se nahoru a dolů a dopředu a dozadu.
- Křeslo je schopné samo automaticky detekovat pozici ramen a vybrat nejvhodnější nastavení masážních hlav. Zároveň detekuje křivky těla uživatele a tím vhodné tlakové body pro masáž. Díky tomu je prováděná masáž dokonale individuálně přizpůsobena každému uživateli a je více efektivní.
- Další výhodou jsou 4 osobní funkce automatické masáže: uvolňující masáž, osvěžující masáž, masáž pro odstranění bolesti, masáž pro odstranění únavy.
- Nastavení automatické masáže pro horní část těla (krk a ramena, záda a boky).
- Ruční nastavení masáže pro horní část těla - masáž všech/místních/vybraných masážních bodů.

Masážní křeslo SL-A08-3 – Návod k použití

- 6 masážních technik - pleskání, hnětení, promačkávání, Shiatsu a jejich kombinace.
- Nastavení rychlosti v 5 stupních pro každou masážní techniku.
- Vzduchová tlaková masáž paží (prostřednictvím 36 vzduchových vaků) s možností nastavení úrovně tlaku ve 3 stupních.
- Vzduchová tlaková masáž dolní části těla (prostřednictvím 33 vzduchových vaků) se 3 volitelnými režimy masáže a možností nastavení úrovně tlaku ve 3 stupních.
- Vibrační masáž hýždí a chodidel s možností nastavení rychlosti masáže ve 2 stupních.
- Termoterapie zad. Použití karbonových vláken jako zdroje infračerveného hřejivého záření.
- Nastavitelná délka lýtkové opěrky umožňuje její stažení/roztážení podle potřeb uživatele.
- Vstávat i sedat do křesla je možné kdykoliv - mechanické masážní hlavy se automaticky vrací do výchozích poloh.

Účinky používání masážního křesla

- Zmírnění únavy
- Podpora krevního oběhu
- Tišení únavy svalstva
- Uvolnění svalového napětí
- Tišení neuralgie
- Uklidnění bolesti svalů

3. Používání masážního křesla

3.1. Popis ovládacího panelu



Masážní křeslo SL-A08-3 – Návod k použití

Klepněte na ikonu "USB" nebo "CARD" pro přechod do následujícího rozhraní:



POZNÁMKA: Vzhled jednotlivých rozhraní je závislý na tom, ve kterém rozhraní právě pracujete.

3.2. Funkce ovládacích tlačítek

Zap./Vyp. - Krátkým stisknutím zapnete, nebo vypnete masáž. Dlouhým stisknutím zapnete, nebo vypnete ovládací panel.

Šipka nahoru - Stisknutím zvýšíte hlasitost.

Šipka dolů - Stisknutím snížíte hlasitost.

Přehrávání hudby - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 20

Prohlížení obrázků - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 20

Hudba a obrázky - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 20

Promítání filmů - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 21

Datum a čas - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 22

Systémová nastavení - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 22

3.3. Připojení k napájení

Zkontrolujte, zda je masážní křeslo vypnuto, jeden konec napájecího kabelu zastrčte do příslušného otvoru v zadní části křesla, druhý konec zapojte do vhodné, uzemněné elektrické zásuvky. Poté křeslo můžete zapnout.



3.4. Nastavení opěrek křesla

Klepněte na ikonu "Position" (Polohy) pro vstup do rozhraní určeného k optimálnímu nastavení opěrek a poloh sezení v křesle podle Vaší postavy. Pro nastavení opěrky lýtek, zádové opěrky a polohu při sedu vždy klepněte na příslušné tlačítko v tomto rozhraní.





Snížení/zvednutí opěrky lýtek		Stisknutím tlačítka zahájíte pomalé spouštění lýtkové opěrky směrem dolů. Uvolněním tlačítka spouštění zastavíte. Délka lýtkové opěrky bude nastavena automaticky. Stisknutím tlačítka zahájíte pomalé zvedání lýtkové opěrky směrem nahoru. Uvolněním tlačítka zvedání zastavíte. Délka lýtkové opěrky bude nastavena automaticky.
--	---	---

Snížení/zvýšení zádové opěrky		Stisknutím tlačítka se začne zádová opěrka pomalu snižovat do vodorovné polohy. Uvolněním tlačítka pokládání opěrky zastavíte.
		Stisknutím tlačítka se začne zádová opěrka pomalu narovnávat do vzpřímené polohy. Uvolněním tohoto tlačítka narovnáování opěrky zastavíte.
Nastavení polohy vleže/vsedě		Stisknutím tlačítka dojde k současnému narovnáování lýtkové opěrky a pokládání zádové opěrky a nastavování křesla do polohy vleže.
		Stisknutím tlačítka dojde k současnému snižování lýtkové opěrky a narovnáování zádové opěrky a nastavování křesla do polohy vsedě.
Zkrácení/prodloužení opěrky lýtek		Stisknutím tlačítka dojde ke zkracování délky lýtkové opěrky. Uvolněním tlačítka zkracování zastavíte.
		Stisknutím tlačítka dojde k prodloužení délky lýtkové opěrky. Uvolněním tlačítka prodloužování zastavíte.

3.5. Příprava masáže

Stiskněte ikonu pro zapnutí na dotykovém ovládacím panelu, nebo krátce stiskněte tlačítko na ovládacím panelu pro zapnutí masáže a přechod do rozhraní pro nastavení masáže tlakových bodů a detekce pozice ramen. Během detekce masáže tlakových bodů horní části těla, jsou všechna tlačítka neaktivní, vyjma tlačítka "Automatic".

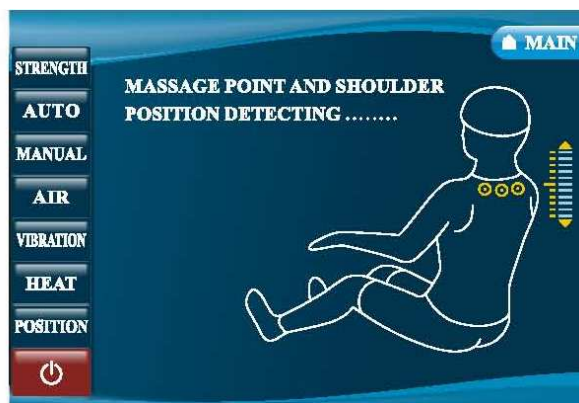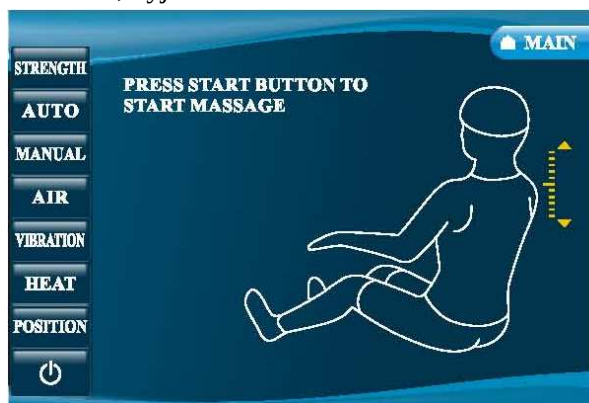


Šedivá barva - režim standby



Červená barva - režim zapnuto

3.5.1. Nastavení pozice ramen (Adjustment of shoulder positions)


Po dokončení vyhledávání bodů masáže prsty a pozice ramen, přejde křeslo do režimu nastavení pozice masáže ramen. Zde je možné vybrat z 11 úrovní pozice ramen. Po nastavení pozice masáže ramen, jsou všechna nutná nastavení ukončena. Pokud není tlačítko pro nastavení pozice masáže ramen stisknuto do 10 sekund, přepne se křeslo automaticky do Pohodlného automatického masážního režimu.

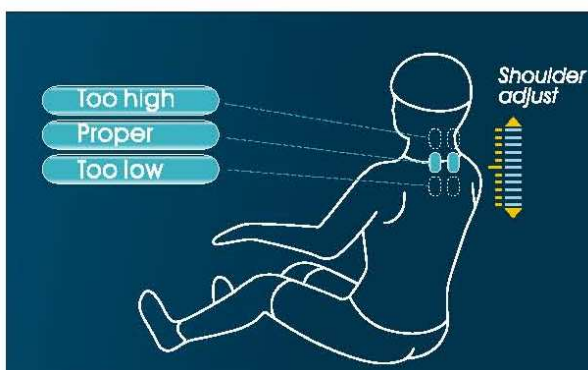



▲	Nastavení polohy masáže krku - nahoru			
▼	Nastavení polohy masáže krku - dolů			
1	2	3	4	5

3.6. Provádění masáže, pozastavení masáže (Running/pause switching)

Rozhraní při provádění masáže

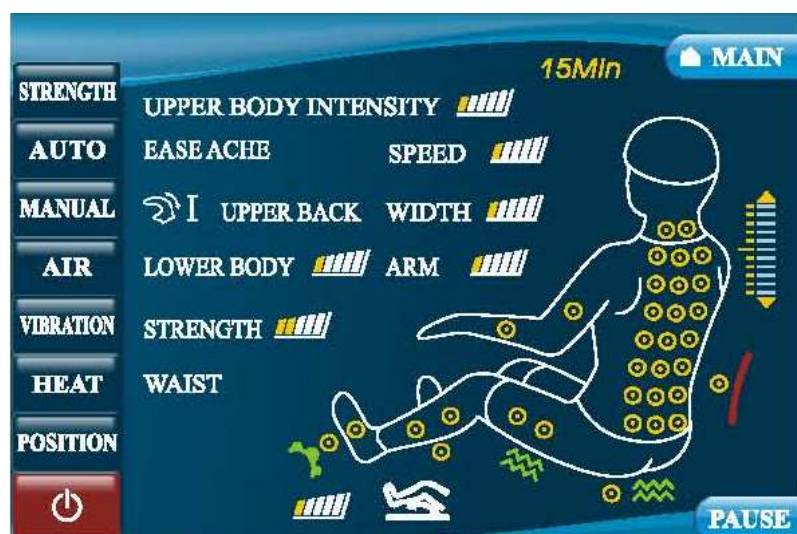



Rozhraní při pozastavené masáži

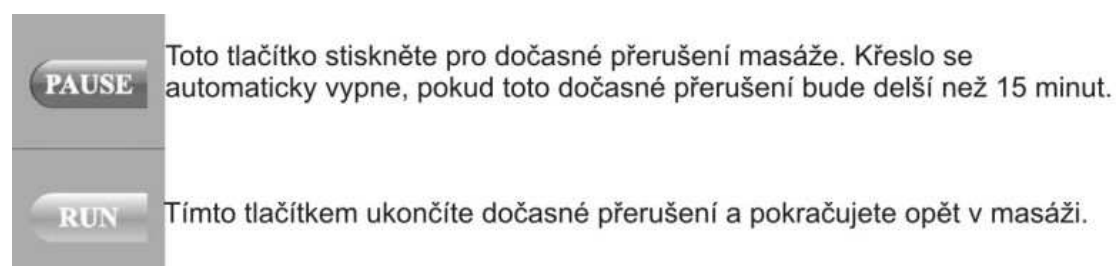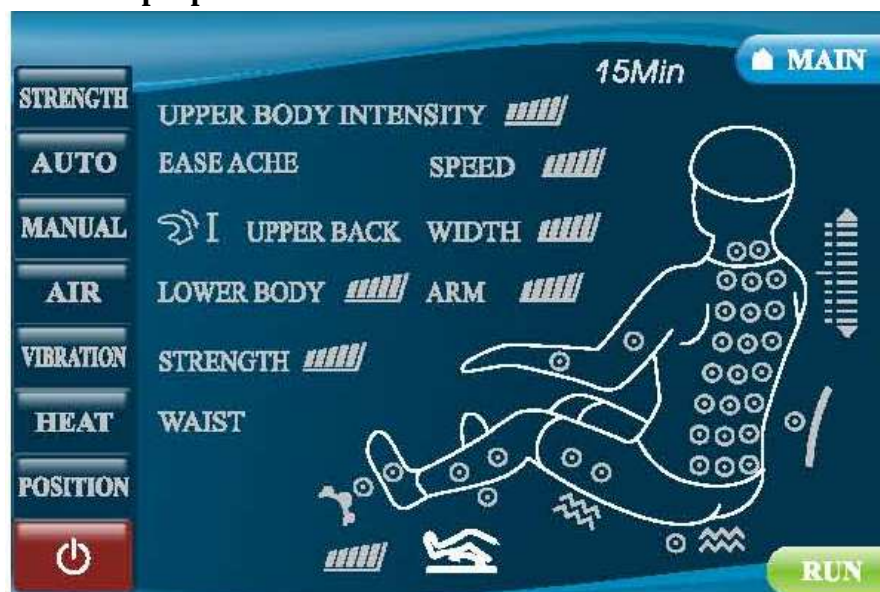

3.7. Nastavení intenzity masáže (Strength)

Klepnutím na tlačítko "Strength" vstoupíte do rozhraní pro nastavení úrovně intenzity masáže. Intenzitu masáže zádové opěrky je možné nastavit v 5 úrovních.

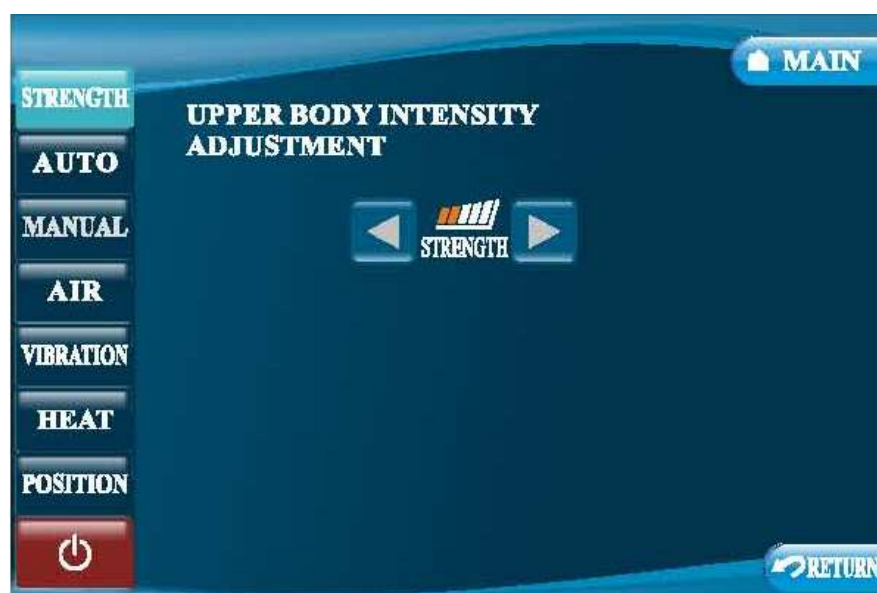

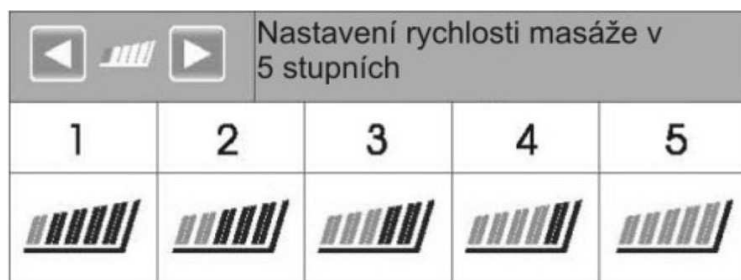

3.8. Automatická masáž (Automatic massage)

Stisknutím tlačítka "Auto" vstoupíte do režimu Automatické masáže a do rozhraní, ve kterém je možné provádět nastavení mnoha funkcí. V případě Automatické masáže není možné provádět nastavení rychlosti a šířky masáže.




POZNÁMKA: Rozhraní pro výběr ostatních funkcí jsou zcela stejné.


Název tlačítka	Funkce
Comfort	Ulevuje celému tělu.
Relax	Povzbuzuje krevní oběh.
Ease Ache (Uklidnění bolesti)	Hlubková masáž prsty pro úlevu od bolesti.
Fatigue Recover (Odstranění vyčerpanosti)	Poskytuje úlevu od fyzické únavy a probouzí organismus.
Upper Body (Horní část těla)	Masáž krku, ramen, zad a boků.
Neck and Shoulder (Krk a ramena)	Masáže zaměřené na krk a ramena.
Back and Waist (Záda a boky)	Masáže zaměřené na záda a boky.
Stop	Vypnutí Automatické masáže.
Return	Přepne na zobrazení stavových informací.
Main	Přepne ovládání do hlavního rozhraní.

3.9. Manuální masáž s možností nastavení rychlosti (Manual massage with speed)

Stiskněte tlačítko Manual pro výběr manuální masáže a vstupte do rozhraní nastavení manuálních masáží. Nastavit lze techniku masáže, protažení zad, rychlost, šířku masáže, nebo synchronizaci s hudbou. Šířku masáže je možné nastavit, pokud jste přepnuti v režimu masáže hlazení, klepání, masáž prsty či pozastavené masáže. Nastavení rychlosti je možné provádět ve všech režimech.

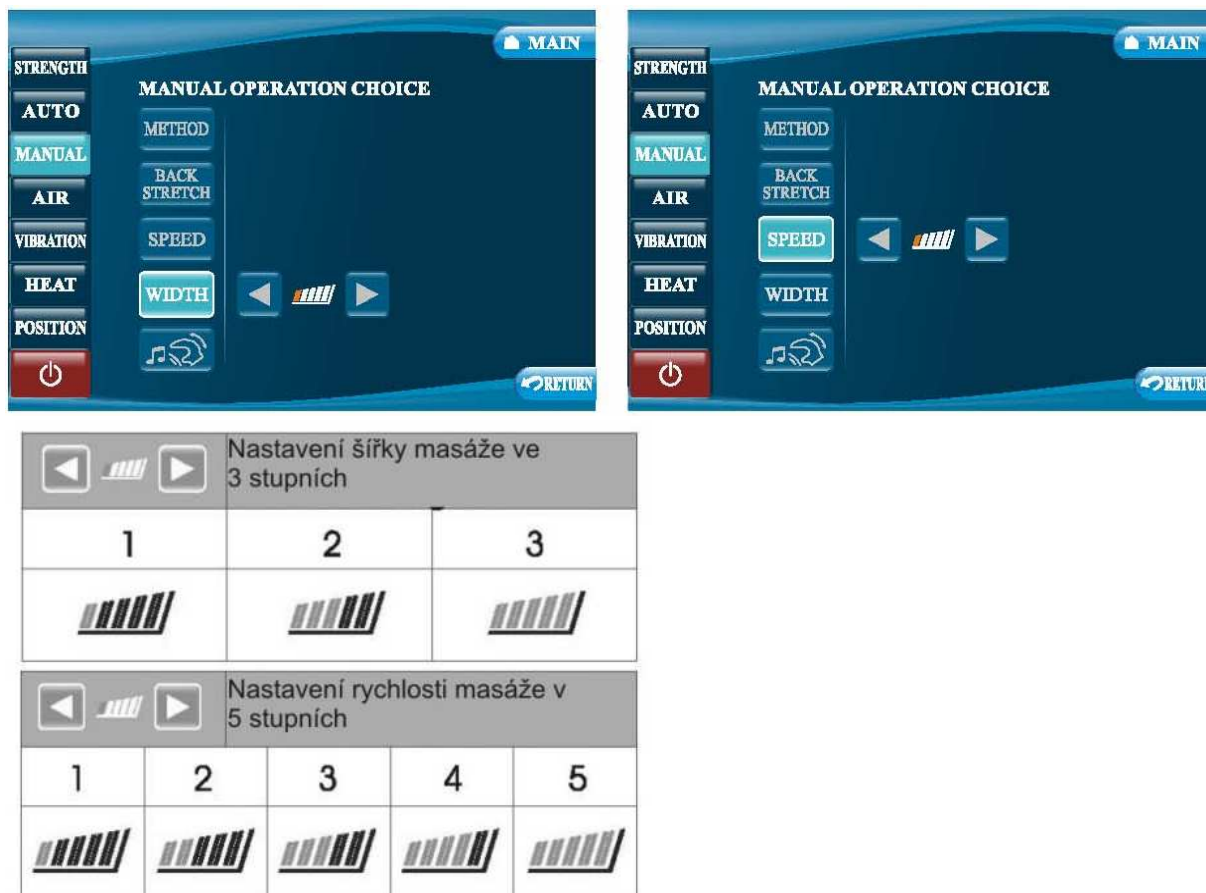


3.10. Techniky manuálních masáží (Manual massage methods)

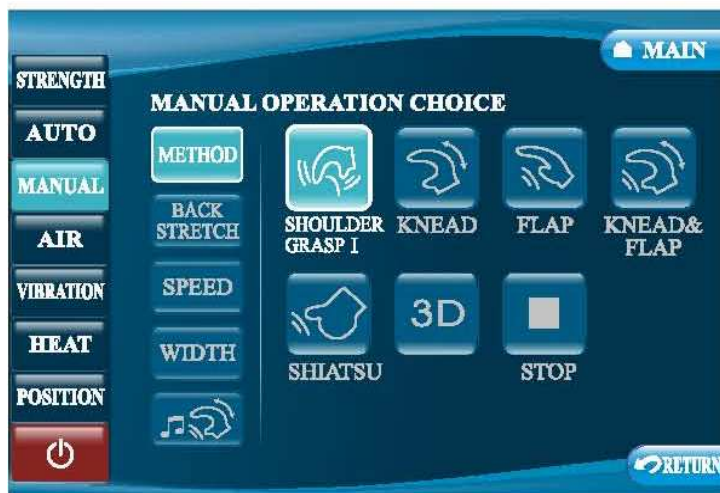

Masážní křeslo SL-A08-3 – Návod k použití

Název tlačítka	Možnost nastavení rychlosti a šířky masáže
3D masáž	Nastavení rychlosti (6 úrovní), šířky a intenzity
Shoulder Grasp I (Masáž ramen)	Nastavení rychlosti (4 úrovně), intenzity
Flap (Pleskání)	Nastavení rychlosti (2 úrovně), šířky a intenzity
Knead (Hnětení)	Nastavení rychlosti (4 úrovně), intenzity.
Shiatsu	Nastavení rychlosti (2 úrovně), šířky a intenzity
Knead & Flap (Hnětení a pleskání)	Nastavení rychlosti (4 úrovně) a intenzity
Stop (Přerušeni masáže)	Nastavení rychlosti (2 úrovně), šířky a intenzity

3.11. Manuální masáž - protažení zad (Manual massage Back stretching)

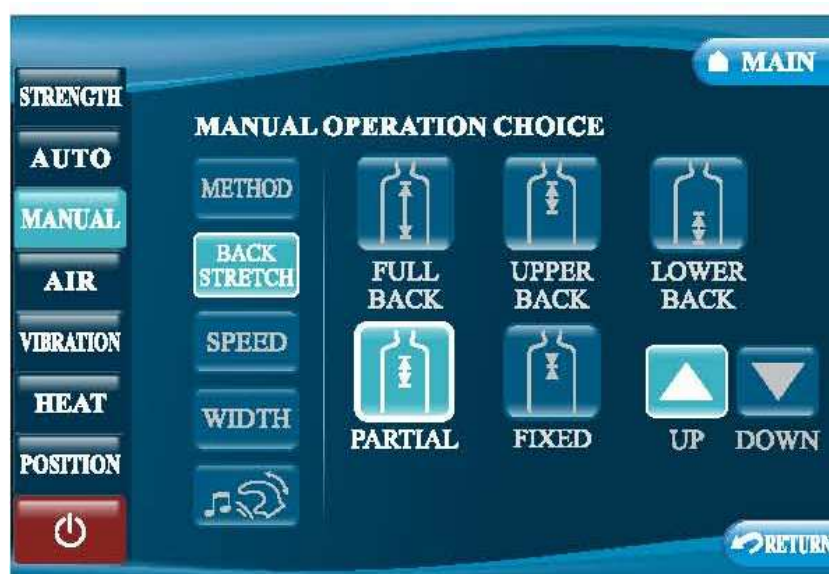


Název tlačítka	Funkce
Full Back (Celá záda)	Obousměrná masáž celých zad.
Upper Back (Horní záda)	Obousměrná masáž horní části zad.
Lower Back (Spodní záda)	Obousměrná masáž dolní části zad.
Partial (Místní masáž)	Obousměrná masáž určitých částí zad.
Fixed (Stálá masáž)	Masáž stálých míst na zádech.

Nastavení pozice masáže (možné ve fixním a lokálním režimu)

Název tlačítka	Funkce
Up (šipka nahoru)	stisknutím této ikony se mechanická masážní hlava pohybuje nahoru. Při uvolnění ikony se hlava pohybovat přestane
Down (šipka dolů)	stisknutím této ikony se mechanická masážní hlava pohybuje dolů. Při uvolnění ikony se hlava pohybovat přestane

3.12. Manuální masáž synchronizovaná s hudbou (Manual massage music synchronization)


Stisknutím ikony Music přejdete do režimu masáže synchronizované s hudbou. Tím dojde k automatickému ukončení ruční i automatické masáže. Rychlost a intenzita vibrací při masáži bude nyní synchronizována s melodií přehrávané hudby. Síla masáže může být nastavena tlačítkem pro nastavení síly (Strength). Tím je možné synchronizovat všechny masážní techniky a naplno si užívat příjemných pocitů působících na duši i tělo.

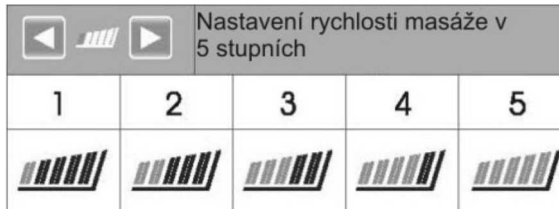

3.13. Masáž vzduchovým polštářem (Pneumatic massage)

Stiskněte tlačítko Pneumatic/Air pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí masáže vzduchovým polštářem. Toto rozhraní obsahuje možnost nastavení masáže spodní části těla a masáže paží.


Pro masáž spodní části těla disponuje masážní křeslo třemi režimy, které je možné aktivovat stisknutím příslušných tlačítek na dotykovém displeji. Pokud je spuštěna masáž dolní části těla a masáž chodidel, je automaticky spuštěn režim protažení lýtek. Pokud je spuštěna masáž hýždí, je automaticky zablokován režim protažení lýtek. Spuštěním masáže dolní části těla a chodidel dojde automaticky k zapnutí funkce rolovací masáže bříšek prstů u nohou.

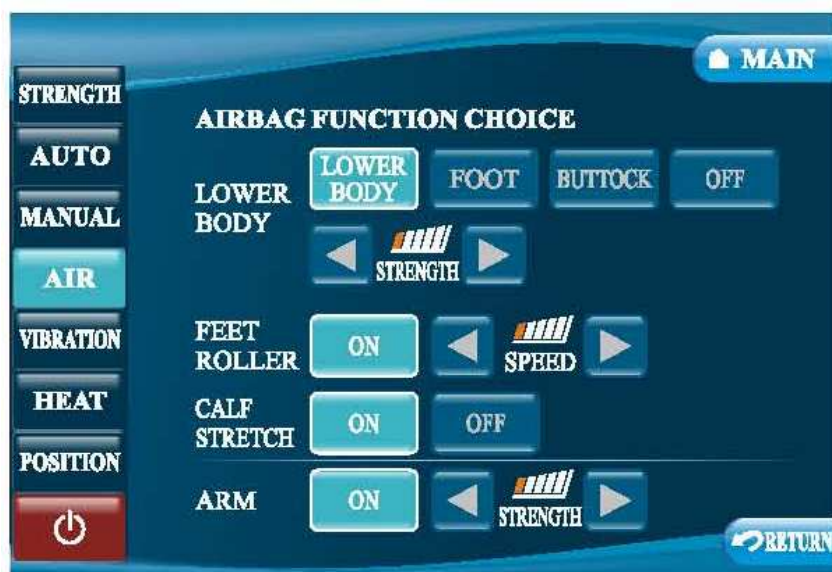

Název tlačítka	Funkce
Lower Body (Spodní část těla)	Spuštění vzduchové masáže spodní části těla.
Foot (Chodidlo)	Spuštění vzduchové masáže chodidel.
Buttock (Hýždě)	Spuštění vzduchové masáže hýždí.
On/Off	Zapnutí/Vypnutí funkce protažení lýtek.
On/Off	Zapnutí/Vypnutí funkce masáže bříšek prstů u nohou.
On/Off	Zapnutí/Vypnutí funkce vzduchové masáže paží.
Strength (Intenzita)	Intenzita masáže dolní části těla (3 úrovně).
Speed (Rychlost)	Rychlost rolovací masáže bříšek prstů u nohou (2 rychlosti).
Strength (Intenzita)	Intenzita vzduchové masáže paží (3 úrovně).

3.14. Vibrační masáž (Vibration)

Stiskněte tlačítko Vibration pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí vibrační masáže.

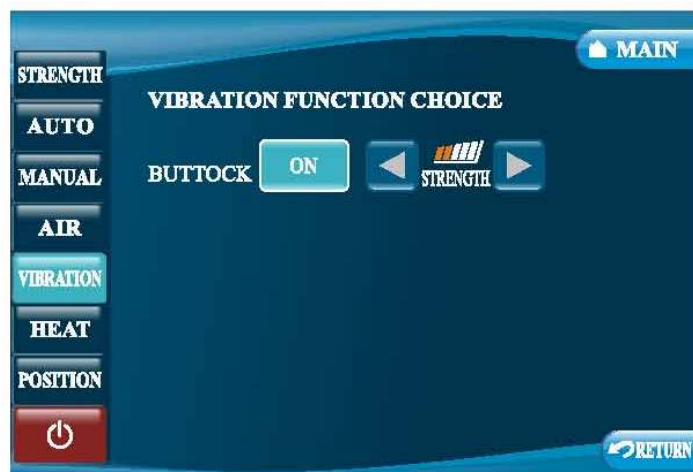

	Tlačítko zapnutí/vypnutí vibrační masáže zadku (On - zapnuto, Off - vypnuto).
	Nastavení intenzity masáže ve 2 úrovních: Low  High 

POZNÁMKA: Spouštění masáže synchronizované s hudbou automaticky spustí vibrační funkci, u níž je možné nastavit její intenzitu.

3.15. Termoterapie (Thermotherapy)

Stiskněte tlačítko Heat (Thermotherapy) pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí termoterapie. Tato nastavení umožňují zvolit termoterapii pro boky. Stisknutím příslušného tlačítka zapnete, nebo vypnete vybranou funkci.

Unikátní termoterapie zajišťovaná rychlým infračerveným zářením pomáhá prohřívat Váš organismus a podporuje během masáže krevní oběh.



Waist (boky)	On - Zapnutá termoterapie pro boky.
	Off - Vypnutá termoterapie pro boky.

3.16. Přehrávání hudby (Music play)

Klepnutím na ikonu "Music" (Hudba) vstupte do rozhraní pro přehrávání hudby.



	Zastavení přehrávání
	Play/Pause
	Režim opakování
	Zvýšení hlasitosti
	Snížení hlasitosti
	Předchozí skladba
	Následující skladba
	Opuštění rozhraní přehrávání hudby

Pro další ovládání funkcí prostřednictvím ovladače v režimu hudby zastavte přehrávání a přejděte do režimu ovládání masáže.

3.17. Prohlížení obrázků (Picture)

Vložte do příslušné zdířky paměťové médium obsahující obrázky (SD kartu, nebo USB disk). Poté klepněte v hlavním rozhraní na ikonu Picture (Obrázky) pro vstup do rozhraní pro prohlížení obrázků. Pro nástroj na přehrávání obrázku jednoduše klepněte na obrázek, který chcete zobrazit.




	Opuštění rozhraní prohlížení obrázků	
	Předchozí video	Následující video
	Play/Pause	Zastavení přehrávání
	Předchozí snímek	Následující snímek
	Otáčení obrazu	Přiblížování obrazu (2x, 4x, 8x, 16x)

POZNÁMKA:

Obrázky a hudební soubory je možné přehrávat z přenosných datových zařízení (USB disky, paměťové karty, apod.). Jednoduše paměťové médium vsuňte do příslušného otvoru a poté klepněte v hlavním rozhraní na ikonu hudby, nebo prohlížení obrázků.

3.18. Přehrávání filmů (Movie)

Vložte do příslušné zdířky paměťové médium obsahující video soubory (SD kartu, nebo USB disk). Poté klepněte v hlavním rozhraní na ikonu Movie (Film) pro vstup do rozhraní pro přehrávání filmů. Pro nástroj na přehrávání jednoduše klepněte na videosoubor, který chcete přehrávat.

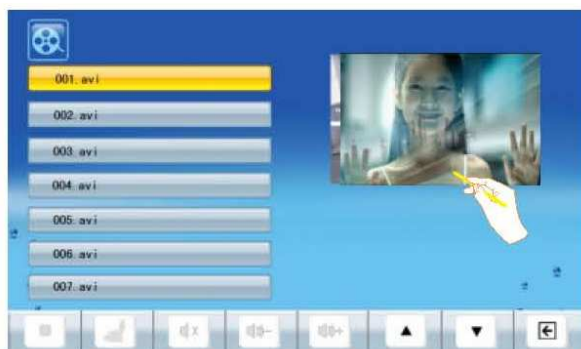

Masážní křeslo SL-A08-3 – Návod k použití

	Předchozí video		Následující video
	Opuštění rozhraní přehrávání filmů		

	Play/Pause		Zastavení přehrávání
	Předchozí		Následující
	Rychlé posunutí zpět (2x, 3x, 4x)		Rychlé posunutí vpřed (2x, 3x, 4x)
	Přibližování obrazu (2x, 3x, 4x)		

3.19. Kalendář a hodiny (Calendar and Clock)

Klepněte na ikonu Time (Hodiny) v hlavním rozhraní pro přístup na zobrazení času a kalendáře. Pro jejich nastavení přejděte v hlavním rozhraní do Systémových nastavení.



3.20. Systémová nastavení (System setup)

V rozhraní System setup (Systémová nastavení) je možné nastavovat jazyk menu, datum, zvukové hlášení, ověření dotykového displeje a další.



Zvukové hlášení (Audio message)

	Zvuková hlášení zapnuta.
	Zvuková hlášení vypnuta.

Jazyk (Language)

	Jazyk menu čínština.
	Jazyk menu angličtina.

Datum a čas (Date and Time)

	Zvýšení hodnoty údaje času, nebo data.
	Snížení hodnoty údaje času, nebo data.

Potvrzení a opuštění (Confirm, Return)

	Opuštění rozhraní systémových nastavení.
	Potvrzení provedených nastavení.


Nastavení jasu a kontrastu displeje (Brightness, Contrast)

	Nastavení jasu displeje (vlevo ztmavení, vpravo zesvětlení)		Nastavení kontrastu displeje (vlevo snížení, vpravo zvýšení)
--	---	--	--

3.20.1. Ověření dotykového displeje




Stisknutím tohoto tlačítka se přepnete do rozhraní pro otestování funkčnosti dotykového displeje.

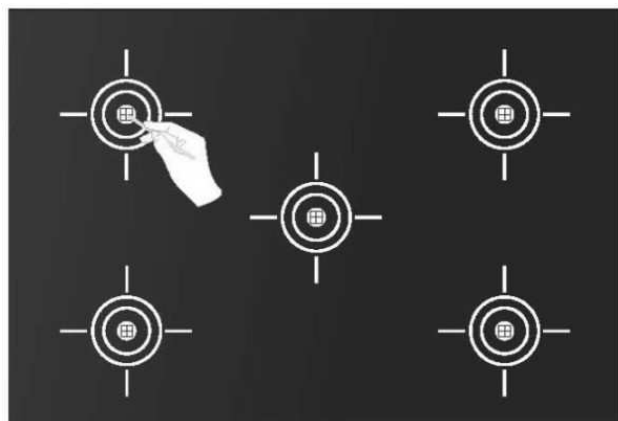

POZNÁMKA: Pro správné ověření funkčnosti dotykového displeje je nutné vždy jemně stisknout střed ověřovacího bodu kulatým hrotem například tužky.

4. Popis tlačítek dálkového ovládání

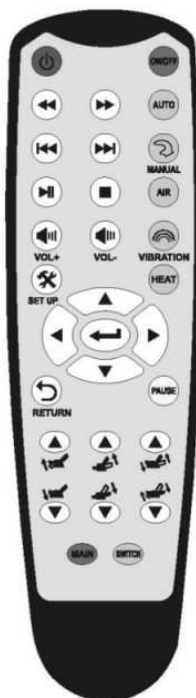

	Vypnutí masáží
	Manuální vypnutí
	Automatická masáž
	Manuální masáž
	Vzduchová masáž
	Vibrační masáž
	Termoterapie
	Zpět
	Dopředu

	Předchozí
	Následující
	Přehrávání/Pauza
	Stop
	Zvýšení hlasitosti
	Snížení hlasitosti

Masážní křeslo SL-A08-3 – Návod k použití

	Navigace nahoru		Snížení opěrky lýtek
	Navigace dolů		Zvednutí opěrky zad
	Navigace doleva		Snížení opěrky zad
	Navigace doprava		Zvednutí obou opěrek
	Potvrzení		Snížení obou opěrek
	Return - opuštění		Přechod do hlavního rozhraní
	Pauza		Přepnutí mezi hlavním rozhraním a informacemi o aktivní masáži
	Zvednutí opěrky lýtek		

5. Vypnutí křesla, odpojení z napájení

1. Pokud je aktivní jakýkoliv masážní režim, stiskněte tlačítko On/Off na dotykovém displeji, krátce tlačítko On/Off na ovládacím panelu pro okamžité zastavení všech masážních programů a navrácení zádové a lýtkové opěrky do základní polohy. Masážní programy jsou také automaticky ukončeny, jakmile vyprší nastavený čas masáže. V tomto případě však zádová a lýtková opěrka nejsou automaticky vráceny do původní polohy.

2. Po ukončení masážních programů odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.




Vypněte hlavní vypínač (v zadní části křesla) a odpojte napájecí kabel ze zástrčky křesla.

6. Montáž masážního křesla


6.1. Instalace ovládacího panelu

Nejprve přimontujte držák ovládacího panelu na křeslo a nasad'te ovládací panel (obr. 1). Ovladač by se v držáku měl volně otáčet ve vertikální poloze (obr. 2) i horizontální poloze (obr. 3).

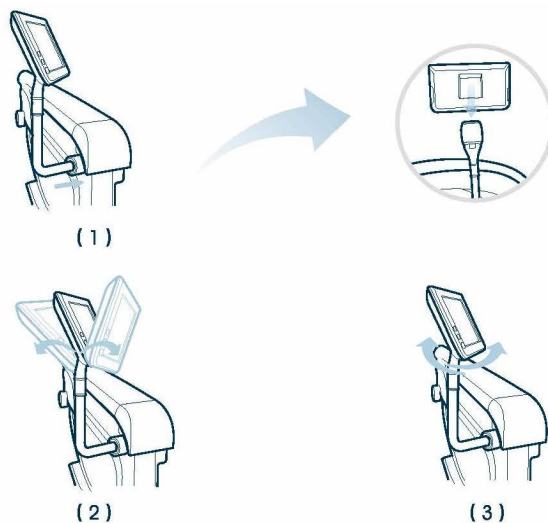


6.2. Sestavení opěrky hlavy a zad

Polštář opěrky hlavy napomáhá snižovat tlak na krk a ramena při hnětací masáži. Sami si můžete určit, zda chcete polštář opěrky používat či ne podle vašich osobních potřeb (my však její použití doporučujeme). Polštář a opěrka jsou spojeny mechanickým zipem (obr. 1) a suchým zipem (obr. 2).

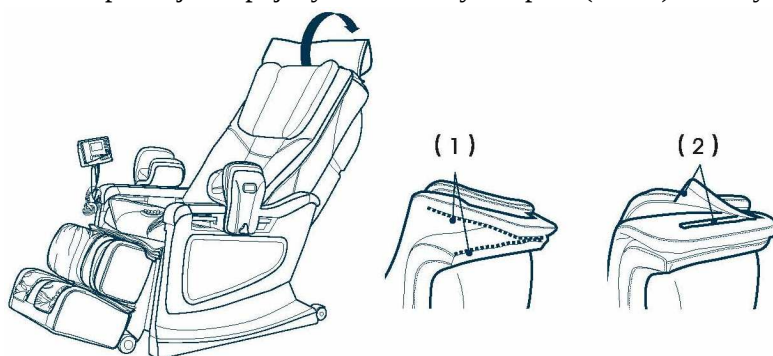

6.3. Instalace opěrky rukou


- Nejprve odstraňte gumovou zátku (obr. 1).
- Gumovou zátku uschovejte do přepravního kartonu od křesla (obr. 2).
- Oba konce opěrky nastavte tak, aby pasovaly do odpovídajících otvorů a pevně přitlačte. Poté ručně otáčejte ve směru hodinových ručiček, až opěrku pevně utáhnete.

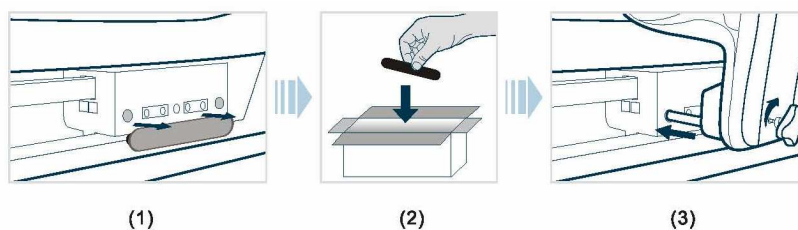

7. Bezpečná manipulace s křeslem


7.1. Přemísťování křesla

Ujistěte se, že jsou napájecí kabel i ostatní kabely vytaženy dostatečně nad povrch podlahy a nakloňte křeslo za zádivou část dozadu do takového úhlu, aby se křeslo postavilo na manipulační kolečka. Opatrně převezte křesla na nové místo a jemně jej zpět narovnejte do normální polohy - vyvarujte se otřesů i nárazů!

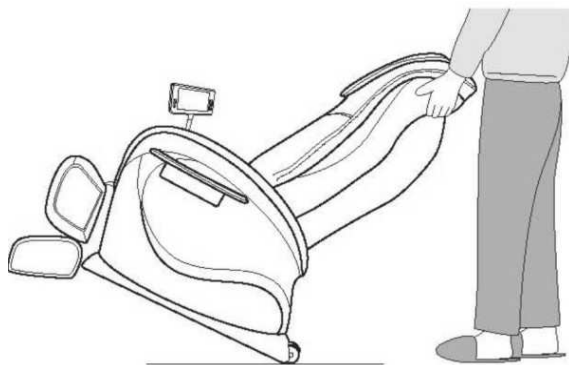

7.2. Zakázané způsoby používání

- Pokud je balík vzduchových polštářů vložen do otvoru napůl délky a křeslo je zapnuto, zasunovací zařízení obdrží signál a je zahájeno plnění polštářů vzduchem. Pokud jsou vzduchové polštáře v otvoru vloženy zcela, žádný vzduch nevychází a polštáře začnou pracovat.
- Pokud je balík vzduchových polštářů vyjmut ven, ale ne zcela, je zcela běžné, že ze spojů bude vycházet vzduch.
- Ruční kolečko bude uvolněno, pokud jej budete točit doleva a bude upevněno při otočení doprava. Je proto možné je odložit souvislým otáčením doleva.
- Pokud se chystáte vyjmout balík vzduchových polštářů, nejprve se ujistěte, že jím lze volně pohybovat dopředu a dozadu.
- Pro zamezení dotyku vzduchových polštářů a doporučujeme naklonit ovládací panel dopředu o cca 20° tak, jak ukazují obrázky 1 a 2 pod textem.

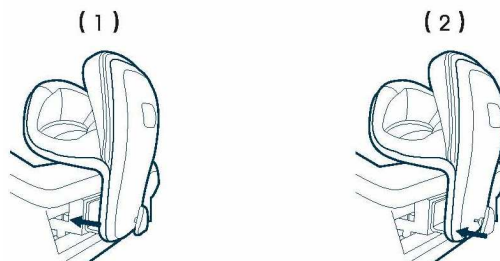

8. Technické parametry

Model:	SL-A08
Konfigurační řada:	05
Napětí:	220-240V - 50/60 Hz
Výkon:	240 W
Doporučená pracovní doba:	20 minut
Rozměry:	184,5 x 76,5 x 76,5 cm
Váha:	122 kg
Hlučnost:	<56 dB
Bezpečnostní třída:	I

9. Další informace a kontakt na prodejce

Starý nefunkční přístroj nesmí být zlikvidován s běžným směsným odpadem. Přístroj musí být zlikvidován odděleně jako nebezpečný odpad.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.

☎ 549 245 575; 602 766 759